




assistina

Wöchentliche Checkliste


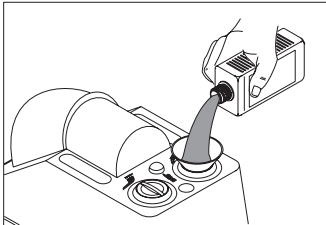


**Füllstandsanzeige überprüfen!
Eventuell nachfüllen!**



Service Oil:
500 ml – 02675910

Reinigungslösung:
1000 ml – 02680200



Set 02680500:
1000 ml Reinigungslösung und 500 ml Service Oil

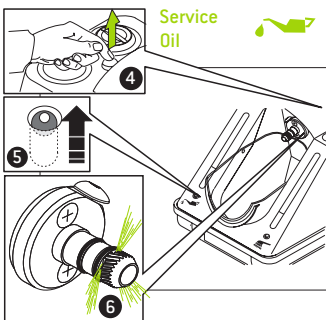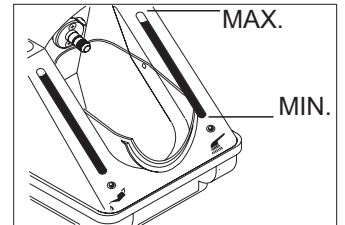



Funktion überprüfen!

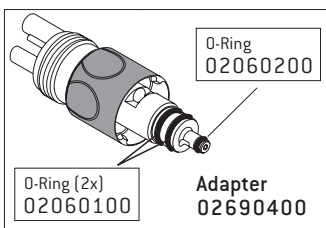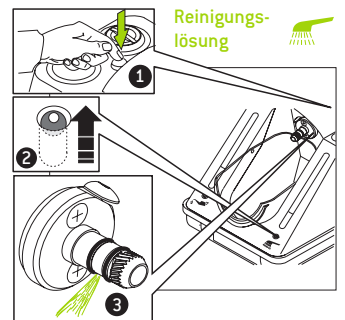

**O-Ringe überprüfen!
Auf richtige Position
und / oder
Beschädigung achten!**

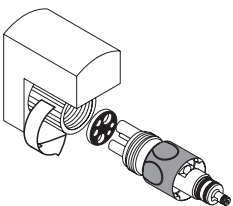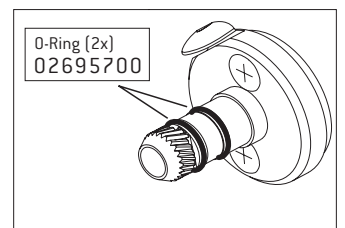

Verbindungen gut festziehen! (Dichtheit)

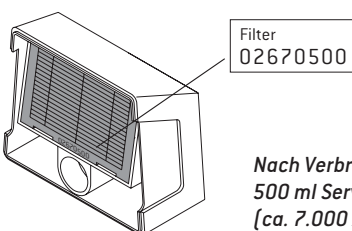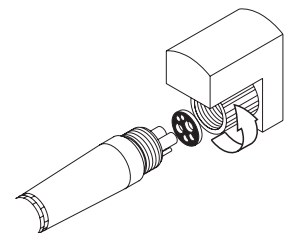

**Nach Verbrauch einer
500 ml Service Oil Flasche
(ca. 7.000 Zyklen)**

Filterwechsel!

Filter
02675200

Jährlich

