Instrucciones de uso





rote quick

Acoplamiento rápido RQ-03, RQ-04 RQ-14, RQ-24, RQ-34 RA-24, RA-25

4:--

Prueba de funcionamiento..........
Higiene y mantenimiento......

Símbolos W&H		4
	Introducción	
	Indicaciones de seguridad	
	Descripción del producto	
	Puesta en marcha	
	Conectar el acoplamiento rápido	
	Desconectar el acoplamiento rápido	. 17

Cambio de los productos neumáticos

Indicaciones generales

Limitación en el procesamiento

Primer tratamiento en el lugar de uso	26
Limpieza manual	27
Desinfección manual	
Control, mantenimiento e inspección	29
Embalaie	30
Esterilización	31
Almacenamiento	33
Mantenimiento	34
Servicio técnico.	39
Accesorios, consumibles, piezas de repuesto y otros productos sanitarios recomendados por W&I	H40
Datos técnicos	
Desecho	43
ndiciones de garantía	44
vicios Técnicos Autorizados W&H	

Símbolos W&H

en las instrucciones de uso



lack



Z

¡ATENCIÓN! Riesgo de lesiones a personas

¡AVISO IMPORTANTE! Riesgo de daños en objetos Explicaciones generales, sin riesgo para personas u objetos No desechar junto con la basura doméstica

en el producto sanitario/el embalaie

Símbolos W&H

Componente de aplicación del tipo B [no apto para aplicación intracardíaca]

MD Producto



4


4

Símbolos W&H

en el producto sanitario/el embalaje



DataMatrix Code para la información del producto, incluida la UDI (Unique Device Identification)

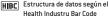



Marca de verificación UL para componentes reconocidos en Canadá y EE. UU.



Esterilizable hasta la temperatura indicada



CE

XXXX

Número de serie



¡Atención! Según las leyes Federales de los EE. UU., la venta de este



producto solo está permitida mediante o por la indicación de un dentista. un médico, un veterinario u otro facultativo médico con un permiso en el Estado Federal en el que ejerce el facultativo y desea utilizar este producto o promover su uso.

1. Introducción

La satisfacción de nuestros clientes comienza por la política de calidad de W&H. El presente producto sanitario fue elaborado, producido y controlado según las leyes y normativas vigentes.

sanitario, proporcionándole un funcionamiento libre de molestias, rentable u seguro.

Para su seguridad y la de sus pacientes Lea las instrucciones de uso antes de la primera aplicación del producto. Estas le guiarán en el uso del producto

Siga las indicaciones de seguridad.

Uso adecuado

Pieza de conexión para transmitir medios (aire, agua, electricidad y/o luz) entre la manguera de alimentación de la unidad dental y los accionamientos neumáticos.



Un uso inadecuado puede dañar el producto sanitario y provocar riesgos y peligros para el paciente, el usuario u terceros.



Cualificación del usuario

Durante el desarrollo y diseño del producto sanitario, hemos pensado en dentistas, higienistas dentales, especialistas en el tratamiento dental (profilaxis) y asistentes para el tratamiento dental como grupos de destinatarios

Responsabilidad del fabricante

El fabricante solo puede considerarse responsable a efectos de seguridad, fiabilidad y rendimiento del producto sanitario si se cumplen las siguientes condiciones:

- > El producto sanitario debe utilizarse siguiendo las instrucciones contenidas en estas instrucciones de uso.
- Solo deben sustituirse por los componentes (p. ej. juntas tóricas) homologados por el fabricante.
 Las modificaciones o reparaciones debe realizarlas solamente el Servicio Técnico Autorizado W&H (vea la
- página 45).

 > Corriia las averías como se describe en las instrucciones de uso.



Aplicación especializada

accidentes como estas instrucciones de uso.

El producto sanitario está destinado exclusivamente a aplicaciones especializadas conforme al uso adecuado, debiendo observarse en todo momento tanto las normas de protección en el trabajo y de prevención de

Los trabajos de procesamiento y mantenimiento del producto sanitario deben encomendarse exclusivamente a personas instruidas en autoprotección, protección de pacientes u protección contra infecciones.

Un uso inadecuado (p. ej., por higiene y mantenimiento deficientes), el incumplimiento de nuestras instrucciones de uso o la utilización de accesorios y piezas de repuesto no homologados por W&H nos exime de toda responsabilidad respecto a garantía y de cualesquiera otras pretensiones.



Se debe informar de todos los incidentes graves relacionados con el producto sanitario al fabricante y a las autoridades competentes.

2. Indicaciones de seguridad



- > Guarde el producto sanitario 24 horas antes de la primera puesta en marcha a temperatura ambiente.
- > El producto sanitario solo debe utilizarse con unidades de alimentación que cumplan las normas IEC 60601-1 (EN 60601-1) e IEC 60601-1-2 (EN 60601-1-2).

La fuente de alimentación de la unidad dental debe cumplir los siguientes requisitos, que el montador del sistema debe garantizar (en relación con acoplamientos con suministro eléctrico externo y el componente de aplicación):

- Aislamiento doble entre los circuitos eléctricos primario y secundario para la máxima tensión de alimentación previsible.
- > Aislamiento doble entre la tensión secundaria y el conductor protector (PE) para la máxima tensión secundaria previsible.



- > Los circuitos eléctricos secundarios deben estar separados galvánicamente entre sí.
- Los circuitos eléctricos secundarios deben estar protegidos contra cortocircuitos y sobrecargas.

 (máximo 700 mA solo para RA-24)
- > Deberán respetarse las corrientes de fuga de y entre los componentes de aplicación.
- >> La tensión secundaria para el suministro del producto sanitario debe ascender a 4,2 V CA o 6 V CC como máximo. (3.3 V CA/CC solo para RA-24)
- > Nunca toque simultáneamente al paciente y las conexiones eléctricas del producto sanitario.
- > Utilice únicamente mangueras de alimentación en cumplimiento de la norma EN ISO 9168.
- > Asegúrese siempre de las correctas condiciones de funcionamiento y la correcta función de refrigerante.
- > Antes de cada aplicación, compruebe que el producto sanitario no tenga desperfectos ni piezas sueltas.
- > No ponga en marcha el producto sanitario en caso de estar dañado.
- > Antes de cada aplicación, realice una prueba de funcionamiento.
- > Evite el contacto visual directo con la fuente de luz.
- > No utilice el producto sanitario como sonda luminosa.




El acoplamiento rápido es una pieza funcional de la manguera de alimentación y también debe verse como una extensión de esta durante el procesamiento. Siempre deben respetarse las concentraciones y tiempos de actuación indicados por el fabricante del sistema de esterilización de avua industrial.

Si se procesa el acoplamiento rápido de forma independiente de la manguera de alimentación, hay disponible información del fabricante del acoplamiento rápido en el capítulo «Higiene y mantenimiento», según la norma ISN 17664.

Higiene y mantenimiento antes de la primera aplicación




> El producto sanitario se entrega sellado en una bolsa de PE y sin esterilizar. > La bolsa de PE y el embalaje no son esterilizables.

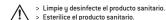



3. Descripción del producto

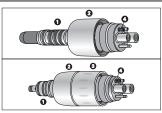

- Juntas tóricas
- Casquillo de empuje
- Anillo de regulación del spray (en RQ-14, RQ-34)
 Filtro de agua con tope antirretorno




Todos los acoplamientos rápidos están equipados con un tope antirretorno. De esta forma se evita el retorno de agua refrigerada contaminada a la turbina u la maneuera de alimentación.

Este tope antirretorno está integrado en el sistema de suministro de agua refrigerada. En caso de obturación de los conductos de agua refrigerada, diríjase a un Servicio Técnico Autorizado W&H (vea la oágina 45).



¡No limpiar los conductos de agua refrigerada con objetos punzantes! [¡Si se daña el elemento de sellado, el tope antirretorno dejará de funcionar!]

4. Puesta en marcha

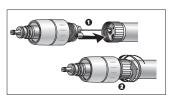

- Conecte el acoplamiento rápido a la manguera de alimentación.
- Apriete la funda de sujeción de la manguera de alimentación con la mano para garantizar la estanqueidad.




Este conjunto ofrece la conexión para aire de accionamiento, aire de pulverización, aire de retorno y agua.



Variantes posibles con electricidad: RQ-24, RQ-34 o con luz: RA-24, RA-25.

Puesta en marcha

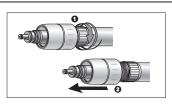

- Desatornille la funda de sujeción de la manguera de alimentación a mano hacia la izquierda.
- Extraiga el acoplamiento rápido con cuidado de la manguera de alimentación.

Comprobar la estanqueidad del acoplamiento rápido




- > Conecte un producto neumático adecuado al acoplamiento rápido.
- z concete un producto neumatico adecuado ai acopiamiento rapido.
 - Active el producto sanitario o, si es posible, solo el agua del spray.
 No puede entrar agua entre el acoplamiento rápido y el producto neumático, ni entre el acoplamiento rápido y la maneuera de alimentación.

Puesta en marcha



- > Siga siempre las recomendaciones del fabricante del producto neumático.
- > Conecte el producto neumático al acoplamiento rápido solo mediante la conexión correspondiente.
- > Si se usan otros productos neumáticos, el usuario es el único responsable. No nos hacemos responsables en estos casos.

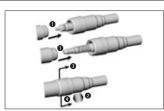



¡No conectar ni desconectar el producto sanitario durante el funcionamiento!

 Conecte el producto neumático al acoplamiento rápido hasta que se oiga que ha encaiado.



O Compruebe que la sujeción esté fija.

- Tire hacia atrás del casquillo de empuje del acoplamiento rápido.
- Desconecte el producto neumático tirando de él en la dirección del eie.

Regular el agua del spray

La regulación del caudal se realiza directamente en el anillo de regulación del spray del producto sanitario [R0-14, R0-34] o en las válvulas instalables de la unidad [R0-03, R0-04, R0-24, RA-24, RA-25].

Caudal mínimo: Lo indican la línea marcada en el anillo de regulación del spray y el punto en el casquillo de empuje.
Caudal máximo: Gire el anillo de regulación del sprau hacia la derecha o la izquierda según sea necesario.



Con este anillo de regulación del spray solo puede variarse el caudal del agua, no interrumpirse por completo.

Prueba de funcionamiento



¡No mantenga el producto sanitario a la altura de los ojos!

- Conecte el acoplamiento rápido a la manguera de alimentación.
 Conecte el producto neumático al acoplamiento rápido hasta que se oiga que ha encajado.
- Conecte el producto neumatico al acopiar
 Ponga el producto neumático en marcha.



En caso de problemas de funcionamiento (p. ej., vibraciones, sonidos inusuales o calentamiento), ponga el producto sanitario inmediatamente fuera de servicio y dirijase a un Servicio Técnico Autorizado W&H.

5. Higiene y mantenimiento



> > Respete las leyes, directivas, normas y especificaciones locales y nacionales sobre limpieza, desinfección y esterilización.



Las indicaciones sobre el procesamiento validado sirven como ejemplo ilustrativo para un procesamiento del producto sanitario conforme a la norma ISO 17664.



 Los acoplamientos sirven como alargadores de la manguera. Limpie y desinfecte el acoplamiento rápido después de cada paciente con un desinfectante de calidad hospitalaria, sin separarlo de la manguera.



Para el secado manual, utilice únicamente aire comprimido libre de aceite y filtrado, con una presión máxima de 3 bar (43.5 osi).

Productos de limpieza y desinfección



- > Siga las indicaciones, instrucciones u advertencias del fabricante de los productos de limpieza u desinfección,
- > Utilice únicamente detergentes aptos para la limpieza o desinfección de productos sanitarios de metal y plástico.
 > Siempre deben respetarse las concentraciones u tiempos de actuación indicados por el fabricante del
- desinfectante.

 > Utilice desinfectantes aprobados y de los cuales se ha demostrado su eficacia, por ejemplo por la Verbund für Angewandte Hygiene e.V. (VAH = Asociación de Higiene Aplicada), la Österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin (ÖGHMP = Sociedad Austriaca para la Higiene, la Microbiología y la Medicina Preventiva), la Food and Drug Administration (FDA = Agencia Estadounidense del Medicamento) o

la U.S. Environmental Protection Agencu (EPA = Agencia de Protección Ambiental de EE, UU.).



Si los productos de limpieza y desinfección indicados no están disponibles, es responsabilidad del usuario validar su procedimiento.





La vida útil y la operatividad del producto sanitario vienen determinadas en gran medida por la fatiga mecánica A durante el uso y los efectos químicos durante el procesamiento.

Envie los productos sanitarios gastados o dañados o los productos sanitarios con modificaciones de material a un Servicio Técnico Autorizado W&H

Ciclos de procesamiento



- > En caso de desinfectar el producto sanitario mediante un paño desinfectante, su uso está garantizado sin restricciones hasta que se perciba una limitación técnica del material o el funcionamiento.
- > El uso del producto sanitario está garantizado hasta un mínimo de 500 ciclos de procesamiento.

Higiene y mantenimiento

fabricante de la unidad



Limpie el producto sanitario inmediatamente después de cada tratamiento.



Limpie el producto sanitario por completo con desinfectante. Cuando el acoplamiento rápido permanece en la manguera de alimentación, siga las indicaciones del



Si se procesa el acoplamiento rápido, sáquelo de la manguera de alimentación u siga los pasos en las



Tenga en cuenta que el desinfectante utilizado durante el tratamiento previo es solo para la protección personal y no puede sustituir al paso de desinfección posterior a la limpieza.





¡No introduzca el producto sanitario en la solución de desinfección ni en el baño ultrasónico!

- > Limpie el producto sanitario bajo agua potable corriente (<35 °C/<95 °F).
- > Lave u frote con un cepillo todas las superficies interiores u exteriores.
- > Elimine los restos de líquido con aire comprimido.

Higiene y mantenimiento



> W&H recomienda la desinfección mediante un paño desinfectante.



Un laboratorio de pruebas independiente proporcionó indicios de la adecuación básica del producto sanitario para una desinfección manual eficaz mediante los desinfectantes «mikrozid® AF wipes» (Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt) y «CaviWipes"» (Metrex).



El producto sanitario no está aprobado para limpieza mecanizada ni desinfección.

Control



- > Tras la limpieza y desinfección, asegúrese de que el producto sanitario no contenga daños, restos de suciedad visibles ni modificaciones de las superficies.
- > Vuelva a procesar los productos sanitarios sucios.
- > Esterilice el producto sanitario después de su limpieza y desinfección.



Embale el producto sanitario en envases adecuados para el proceso de esterilización que cumplan con los siguientes requisitos:

- > El envase para el proceso de esterilización debe cumplir con las normas válidas en cuanto a calidad y aplicación y debe ser adecuado para el proceso de esterilización.
- > El envase para el proceso de esterilización debe ser lo suficientemente grande para el producto a esterilizar.
- > El envase para el proceso de esterilización lleno no debe estar tenso.

Higiene y mantenimiento



W&H recomienda la esterilización según las normas EN 13060, EN 285 o ANSI/AAMI ST55.

> El programa seleccionado debe ser adecuado para el producto sanitario.



> Siga las indicaciones, instrucciones y advertencias del fabricante de los esterilizadores de vapor.

Procedimientos de esterilización recomendados

- > «Dynamic-air-removal prevacuum cycle» (Tipo B) / «Steam-flush pressure-pulse cycle» (Tipo S)*/** 134 °C (273 °F) durante al menos 3 minutos, 132 °C (270 °F) durante al menos 4 minutos
- > «Gravity-displacement cycle» (Tipo N)** 121 °C (250 °F) durante al menos 30 minutos Temperatura máxima de esterilización: 135 °C (275 °F)



- > Almacene los productos esterilizables en un lugar libre de polvo y seco.
- > La validez del producto esterilizable depende de las condiciones de almacenamiento y del tipo de embalaje.




El acoplamiento rápido puede guardarse en la manguera de alimentación.

6. Mantenimiento Cambio de las juntas tóricas





- Sustituya de inmediato cualquier junta tórica dañada o que presente fugas.
- > Cambie siempre todas las iuntas tóricas.
- > No utilice herramientas afiladas.
- Comprima firmemente la junta tórica entre los dedos pulgar e índice para que se forme un lazo.
 - Extraiga la junta tórica.
- Vuelva a introducir la nueva junta tórica.

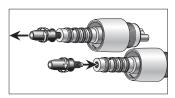


Cambio de la bombilla (RA-24)

> Desenrosque la bombilla a mano en sentido contrario a las agujas del reloj y sustitúyala por una nueva.



Compruebe que la sujeción esté fija.

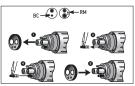

Cambio del filtro de agua (BC/RM)

Extraiga la junta.

6

- 0 Extraiga el filtro de agua con ayuda de una pinza.
- Limpie el filtro de agua (vea la página 37). •
- 0 Coloque el filtro de agua. Deslice la junta.



Limpiar el filtro de agua (BC/RM)

 Limpie cuidadosamente los orificios con el limpiador de toberas para eliminar suciedad y depósitos.



El filtro de agua puede limpiarse con baño ultrasónico.



Si la avería no se corrige, diríjase a un Servicio Técnico Autorizado W&H.



> Repita todo el proceso de higiene y mantenimiento.



Limpieza de la fuente de luz (RA-24, RA-25)



Evite arañar la fuente de luz!

- Lave la fuente de luz con un líquido limpiador u un paño suave.
- Segue la fuente de luz con aire comprimido o con un paño suave.



- Lleve a cabo una comprobación visual después de cada limpieza.
- > No ponga en marcha el producto sanitario si la fuente de luz está dañada y diríjase a un Servicio Técnico Autorizado W&H.

7. Servicio Reparaciones y devolución

En caso de problemas de funcionamiento, diríjase directamente a un Servicio Técnico Autorizado W&H. Las reparaciones y trabajos de mantenimiento debe realizarlos solamente el Servicio Técnico Autorizado W&H.



> Asegúrese de que el producto sanitario se ha sometido al procesamiento completo antes de su devolución.

8. Accesorios, consumibles, piezas de repuesto y otros productos sanitarios recomendados por W&H Utilice únicamente accesorios y piezas de repuesto originales W&H o accesorios cuyo uso esté homologado

por W&H.

Proveedor: distribuidores W&H

Junta tórica, pequeña

02060100 Junta tórica, grande

02202300 Junta RM

Junta BC (RQ-03) 01000700 04697000 Válvula antirretorno

04697100 Tubería de agua 03523000 Bombilla de repuesto (RA-24)

02060200

9. Datos técnicos

Acoplamiento rápido	RQ-03	RQ-04	RQ-14	RQ-24	RQ-34	RA-24	RA-25
Conexión de manguera según la norma	Tipo 1:	Tipo	3:		Tipo 3:		Tipo 2:
EN ISO 9168:2009	«Borden»	«Ritter Midwe	st (4 vías)»	«	Ritter Midwest	(6 vías)»	«Ritter Midwest (US)»
Conexión de producto sanitario	Productos «Roto Quick»				Productos «LW»		
Caudal regulable			×		х		
Luz						x Bombilla halógena	x Varilla de vidrio
Contacto eléctrico (para transmitir la fuerza al producto sanitario)				х	×		
Tensión de alimentación recomendada V CC o V CA ±0,1				3,2	3,2	3,2	
Esterilizable	×	×	×	×	×	x	x



Indicaciones de temperatura

\ Temperatura del producto sanitario en el lado del usuario: máximo 55 °C (131 °F)

Condiciones ambientales

Temperatura durante el almacenaje y el transporte:

Humedad del aire durante el almacenaje y el transporte:

Temperatura durante el almacenaje y el transporte:

Humedad del aire en funcionamiento:

+10°C a +30°C (-40°F a +158°F)

del 15° al 80° (relativa), sin condensación

+10°C a +30°C (+50°F a +86°F)

del 15° al 80° (relativa). sin condensación

10. Desecho



En el momento de desechar el aparato, asegúrese de que las piezas no estén contaminadas.



Respete las leyes, directivas, normas y especificaciones locales y nacionales sobre el desecho.

- > Producto sanitario
 - > Embalaie

Condiciones de garantía

Este producto sanitario de W&H ha sido fabricado con el mayor cuidado por personal altamente cualificado. Los numerosos controles y las comprobaciones garantizan su perfecto funcionamiento. Por favor tenga en cuenta que los derechos de la garantía son solo válidos si se han observado todas las instrucciones proporcionadas en las instrucciones de uso que se incluyen.

W&H se hace responsable como fabricante de los fallos en el material o de fabricación a partir de la fecha de compra y durante un periodo de garantía de 24 meses. Los accesorios y los consumibles están excluidos de la garantía.

Declinamos toda responsabilidad en caso de daños causados por un uso incorrecto o de las reparaciones realizadas por terceros no autorizados por W&H.

. Para cualquier reclamación de garantía, dirijase al proveedor o a un servicio técnico autorizado de W&H y presente el resguardo de compra. La prestación de cualquier servicio en garantía no amplía el plazo de vigencia de esta ni ningún otro plazo de responsabilidad por parte del fabricante.

meses de garantía

Servicios Técnicos Autorizados W&H

Visite el sitio web de W&H en la dirección http://wh.com

En el elemento de menú «Servicios» encontrará su Servicio Técnico Autorizado W&H más cercano.

O escanee el código QR.



Fahricante

Form-Nr. 50610 ASP

Rev. 009 / 14.11.2022

Salvo modificaciones

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH

Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria

