Osstell用クイックガイド



使用開始 - 全般



Osstell ISQモジュール




USBを接続します。



ケーブル付き測定用プローブ, テスト用ペグ, スマートペグマ ウント



測定用プローブを接続します。 向きに注意して下さい!

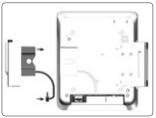

カチッと音がして固定されるまで、Osstell ISQを押し込みます。
USBケーブルの位置に
注意して下さい!



ユニバーサルサポートを取り付けて固定します。

Osstell用クイックガイド



これは科学的データの概要であるため、公式な勧告を意味するものではありません。オッセオインテグレーションをモニタリングするには、インプラントの挿入後、およびインプラントの修復前に測定を行う必要があります。

科学的な研究についてはこちらwww.osstell.comをご覧下さい

