

Kurzanleitung für Assistina Twin


Diese Kurzanleitung ersetzt NICHT die Gebrauchsanweisung für die Assistina!
Bei eventuellen Fragen oder Unklarheiten bitte immer die Gebrauchsanweisung zu Rate ziehen.




Tragen Sie Schutzkleidung, Schutzbrille, Schutzmaske und Handschuhe.

assistina^{TWIN}

1. Kartusche einsetzen/entnehmen

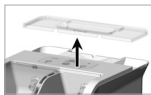

- a) Abdeckung Kartuschenfach entfernen.

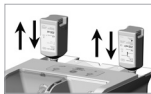

- b) **Kartusche einsetzen/entnehmen**
- › Kartusche bis auf Anschlag einschieben.
 - › Kartusche herausziehen.
- c) Abdeckung Kartuschenfach einsetzen.




Kartuschen müssen beim Einsetzen Raumtemperatur haben.




Der Kartuschendorn im Medizinprodukt ist spitz. Achten Sie auf die Verletzungsgefahr durch den herausstehenden Dorn!

2. Filter einsetzen/entnehmen

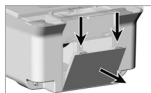

- a) Abdeckung Filterfach öffnen.

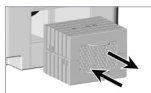


- b) **Filter einsetzen/entnehmen**
- › Filter bis auf Anschlag einschieben.
 - › Filter herausziehen.
- c) Abdeckung Filterfach schließen.

4. Erstbefüllung durchführen



- › Erstbefüllung ohne Übertragungsinstrument durchführen.
- › Mit einer beliebigen Kammer beginnen.

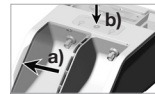

- a) Mit dem Schiebefenster eine Kammer schließen.
b) Starttaste ca. 5 Sekunden drücken.




- Die Erstbefüllung der 1. Kammer dauert ca. 1 Minute.
- › LED Kammer blinkt grün.
 - › LED W&H Service Oil und W&H Activefluid leuchten grün.



- Erstbefüllung 1. Kammer korrekt beendet.
- › LED 1. Kammer leuchtet grün.
 - › LED 2. Kammer leuchtet orange.
 - › LED W&H Service Oil und W&H Activefluid leuchten grün.



- c) Mit dem Schiebefenster die andere Kammer schließen.
› Erstbefüllung wird automatisch fortgesetzt.

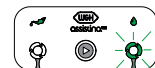


- Die Erstbefüllung der 2. Kammer dauert ca. 1 Minute.
- › LED Kammer blinkt grün.
 - › LED W&H Service Oil und W&H Activefluid leuchten grün.



- Erstbefüllung ist korrekt beendet.
- › LED beider Kammern leuchten grün.

5. Betrieb

Bestücken/Entnehmen von Übertragungsinstrumenten mit ISO-Anschluss

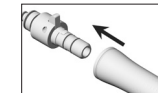


- a) Übertragungsinstrument mit der Austrittsöffnung nach unten auf den Adapter stecken.
› Drehring des Luftmotors auf Rechts- oder Linkslauf stellen.
In der »0«-Stellung erfolgt keine Pflege.




- b) Übertragungsinstrument mit Adapter aufstecken.
c) Schiebefenster schließen.
d) Starttaste drücken.

Bestücken/Entnahme von Übertragungsinstrumenten bzw. Adaptern mit RM Fix-Anschluss

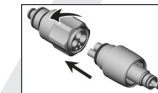

- a) Übertragungsinstrument bzw. Adapter auf den Adapter Quick RM stecken und Überwurfmutter linksdrehend von Hand festziehen.

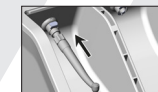

- b) Adapter Quick RM mit Übertragungsinstrument oder gegebenenfalls Adapter mit Übertragungsinstrument aufstecken.
c) Schiebefenster schließen.
d) Starttaste drücken.



- Pflegeprozess wird durchgeführt.
- › LED blinkt grün.
 - › Der Pflegeprozess läuft in ca. 10 Sekunden automatisch ab.



- Pflegeprozess ist korrekt beendet.
- › LED Kammer leuchtet grün.
 - › Signalton ertönt.


3. Ausblasfunktion aktivieren/deaktivieren (optional)



- › Aktivieren Sie die Ausblasfunktion um Flüssigkeitsreste im Übertragungsinstrument zu minimieren.
- › Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, bevor die Ausblasfunktion aktiviert wird.



Die Aktivierung/Deaktivierung der Ausblasfunktion wird gespeichert und bleibt auch nach dem Ausschalten bzw. Stand-By-Modus des Geräts erhalten.

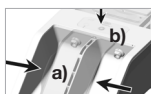

- a) Schiebefenster auf Mittelstellung positionieren.
b) Starttaste 5 Sekunden drücken.



Aktivieren

- › Signalton ertönt
- › LED Starttaste leuchtet 1 Sekunde dunkelblau.




Deaktivieren

- › Signalton ertönt
- › LED Starttaste leuchtet 1 Sekunde grün.



Kurzanleitung für Assistina Twin

Übersicht Fehlermeldungen

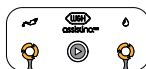

Schiebefenster offen:
› Schiebefenster schließen.

LED Kammern
leuchten orange.



LED Kammern
und Starttaste
leuchten rot.

Elektronikfehler:
› Medizinprodukt aus-/einstecken.
› Starttaste drücken.
Fehler tritt erneut auf:
› Komplettes Medizinprodukt an einen
autorisierten W&H Servicepartner
einsenden.




LED Kammer rechts
oder
links leuchtet rot.
LED Starttaste
leuchtet grün.

Pflegeprozess nicht korrekt beendet:
› Starttaste drücken.
› Pflegeprozess wiederholen.



LED Starttaste
leuchtet blau.

Luftmangel:
› Luftversorgung wieder herstellen.

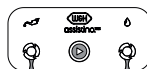

Kein LED leuchtet.

Medizinprodukt im Stand-By-Modus:
› Starttaste drücken.
Medizinprodukt nicht am Stromnetz
angeschlossen:
› Stromversorgung herstellen.



LED Kammer rechts
oder links
leuchtet rot.
LED Starttaste
leuchtet blau.

Ölpflege des Spannsystems nicht
korrekt beendet.
Luftmangel:
› Luftversorgung wieder herstellen.
› Starttaste drücken.
› Ölpflege wiederholen.



LED Kammer rechts
oder links,
LED W&H Service
Oil und
W&H Activefluid
leuchten rot.
LED Starttaste
leuchtet grün.

Erstbefüllung nicht korrekt beendet:
› Kartuschen kontrollieren:
› korrekt einstecken,
› leer (Kartusche ersetzen).
› Starttaste drücken.
› Erstbefüllung wiederholen.



W&H Service Oil und
W&H Activefluid
leuchten orange.

Wenig Flüssigkeit in der Kartusche:
› Kartuschen so bald wie möglich
tauschen.



W&H Service Oil und
W&H Activefluid
leuchten rot.

Kartuschen leer:
› Kartuschen tauschen.
› Erstbefüllung durchführen.



LED Kammer rechts
oder links,
W&H Service Oil und
W&H Activefluid
leuchten rot.
LED Starttaste
leuchtet blau.

Erstbefüllung nicht korrekt beendet.
Luftmangel:
› Luftversorgung wieder herstellen.
› Starttaste drücken.
› Erstbefüllung wiederholen.



LED Kammer rechts
oder links
leuchtet rot.
LED Starttaste
leuchtet lila.

Ölpflege des Spannsystems nicht
korrekt beendet:
› Starttaste drücken.
› Ölpflege wiederholen.