

#whdentalwerk



video.wh.com

Agora em seu  
representante local  
ou em **wh.com**



# Sistema de pontas Piezo.

Durável. Seguro. Eficiente.

De profissionais para  
profissionais.



## Sistema de Pontas Piezo da W&H

O sistema de pontas da W&H foi desenvolvido em colaboração com usuários finais e desenhado especialmente para os requisitos técnicos da tecnologia Piezo da W&H. É perfeito para as respectivas áreas de aplicação e adequado para cada etapa de tratamento.



### Higiene e manutenção

Todas as pontas e substituidores de pontas são desinfetáveis termicamente e esterilizáveis.



### Utilização rápida, simples e segura

O substituidor de pontas W&H permite uma utilização rápida e segura. O controle de torque integrado previne um apertamento excessivo e facilita a troca das pontas com facilidade e segurança.



### Cartão de pontas do ultrassom piezoelétrico

Nem mesmo as pontas W&H são resistentes ao desgaste do material. Com a ajuda do cartão de pontas, o comprimento da ponta pode ser verificado usando a linha vermelha, podendo deste modo ser assegurada uma substituição oportuna.

## A questão é a segurança



### Utilize apenas pontas e o respectivo trocador de pontas ou chave de boca autorizados pela W&H:


- › O dispositivo médico com pontas periodontais é adequado para remover cálculo e placa em áreas subgengivais; mas não para aplicações que requerem condições estéreis. Para tratamentos periodontais de pacientes hipersensíveis, escolha a faixa de potência inferior para garantir um tratamento indolor e ideal.
- › Certifique-se de que a forma original das pontas não se altera (por exemplo, devido à queda).
- › As pontas não devem ser dobradas e reafiadas.
- › Introduza a ponta apenas com o dispositivo médico parado.
- › Nunca toque na ponta oscilante.
- › Encaixe o trocador de ponta após cada manuseio na ponta utilizada do dispositivo médico parado (proteção contra lesões e infecções, proteção da ponta). As pontas que forem trocadas com a chave de boca devem ser removidas do dispositivo médico imediatamente após o tratamento.
- › Nunca toque no trocador de pontas (com a ponta inserida).
- › Verifique o desgaste das pontas com o cartão de pontas fornecido.
- › Substitua as pontas quando o desgaste do material for visível.



# Curva de potência e ângulo de trabalho


## 50% da configuração do dispositivo ≠ 50% da potência

Para um ajuste de potência mais preciso na faixa de potência mais baixa. Preste atenção aos ajustes de potência recomendados das pontas para obter os melhores resultados possíveis.

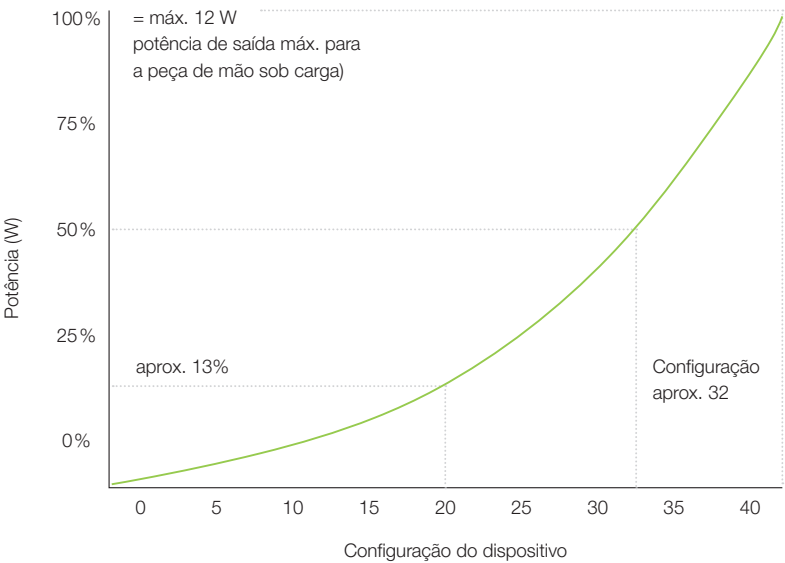

# Raspagem Pontas Universais

Remoção simples, eficiente e cuidadosa de todo cálculo dental supra-gengival. Para todos os quadrantes.

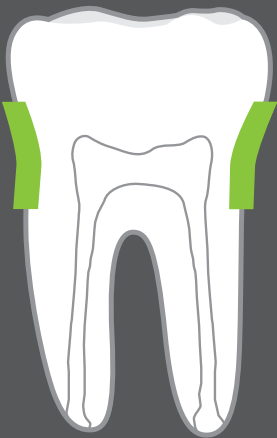

1U 1US	Para a remoção de cálculo supra-gengival grosseiro.	
2U 2US	Para a remoção fina de cálculo supra-gengival, bem como para o tratamento de pacientes em manutenção.	
3U 3US	Para o polimento e remoção fina de cálculo supra-gengival, especialmente adequada para limpeza interdental.	

		<b>Potência:</b> ideal 30 (40%) máx. 40 (100%) <b>Água:</b> ideal 60%–100%
		<b>Potência:</b> ideal 20 (13%) máx. 30 (40%) <b>Água:</b> ideal 60%–100%
		<b>Potência:</b> ideal 20 (13%) máx. 30 (40%) <b>Água:</b> ideal 60%–100%

Level 10 (5% da potência)  
Level 20 (15% da potência)  
Level 30 (50% da potência)  
Level 35 (75% da potência)

Remoção de placa      Periodontia



# Paro Pontas de Periodontia

## Para Terapia Periodontal de Suporte (TPS), manutenção e controle de biofilme.

A sua forma delgada facilita um acesso ideal e atraumático às bolsas periodontais.



1P  
1PS

Remoção de depósitos subgengivais, especialmente adequado para bolsas periodontais profundas.

3Pr

Ponta angulada para direita. Recomendada para manutenção de bolsas periodontais moderadas e profundas, bem como região de furca.

3PI

Ponta angulada para esquerda. Recomendada para manutenção de bolsas periodontais moderadas e profundas, bem como região de furca.

1I

Ponta para uma limpeza eficiente e cuidadosa de implantes e suas respectivas restaurações.

**Potência:**  
ideal 10 (4%)  
máx. 30 (40%)

**Água:**  
ideal 60%–100%

**Potência:**  
ideal 10 (4%)  
máx. 30 (40%)

**Água:**  
ideal 60%–100%

**Potência:**  
ideal 10 (4%)  
máx. 30 (40%)

**Água:**  
ideal 60%–100%

**Potência:**  
ideal 25 (25%)  
máx. 30 (40%)

**Água:**  
ideal 60%–100%

## Compatibilidade das pontas com as peças de mão W&H



compatível com W&H / EMS\*\* / Mectron\*\*

compatível com W&H / NSK\*\* / Satelec\*\*

	W&H/EMS/Mectron		W&H/NSK/Satelec*	
	PB-5 L	PB-3	PB-5 L S	PB-3 S
Proxeo Ultra	X		X	
Built-in	X	X	X	X

\* As pontas W&H com rosca Satelec (por ex. 1US, 2US) são compatíveis com as peças de mão PB-5 L S, PB-3 LED S e PB-3 S da W&H.

\*\* Nota: EMS®, Mectron®, NSK® e Satelec® são marcas comerciais de terceiros que não são afiliadas à W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH. Sempre que usar pontas de outros fornecedores, o usuário é responsável por garantir a configuração correta dos parâmetros de operação do dispositivo piezoelétrico W&H.

## Ângulo de trabalho correto para as peças de mão Proxeo Ultra

Devido à oscilação linear da ponta (para frente e para trás), o ângulo de ataque deve ser tal que a ponta fique alinhada paralelamente à superfície do dente.



# W&H AIMS


## Segurança em primeiro lugar!

**aims** / Advanced  
**Infection Prevention**  
Management Solutions

A higiene é de extrema importância na prática odontológica. O AIMS da W&H está aqui para apoiá-lo: com um amplo portfólio de produtos, conhecimento básico e todas as informações relevantes em um relance.

Para a sua segurança e a segurança dos seus pacientes.

**aims.wh.com**

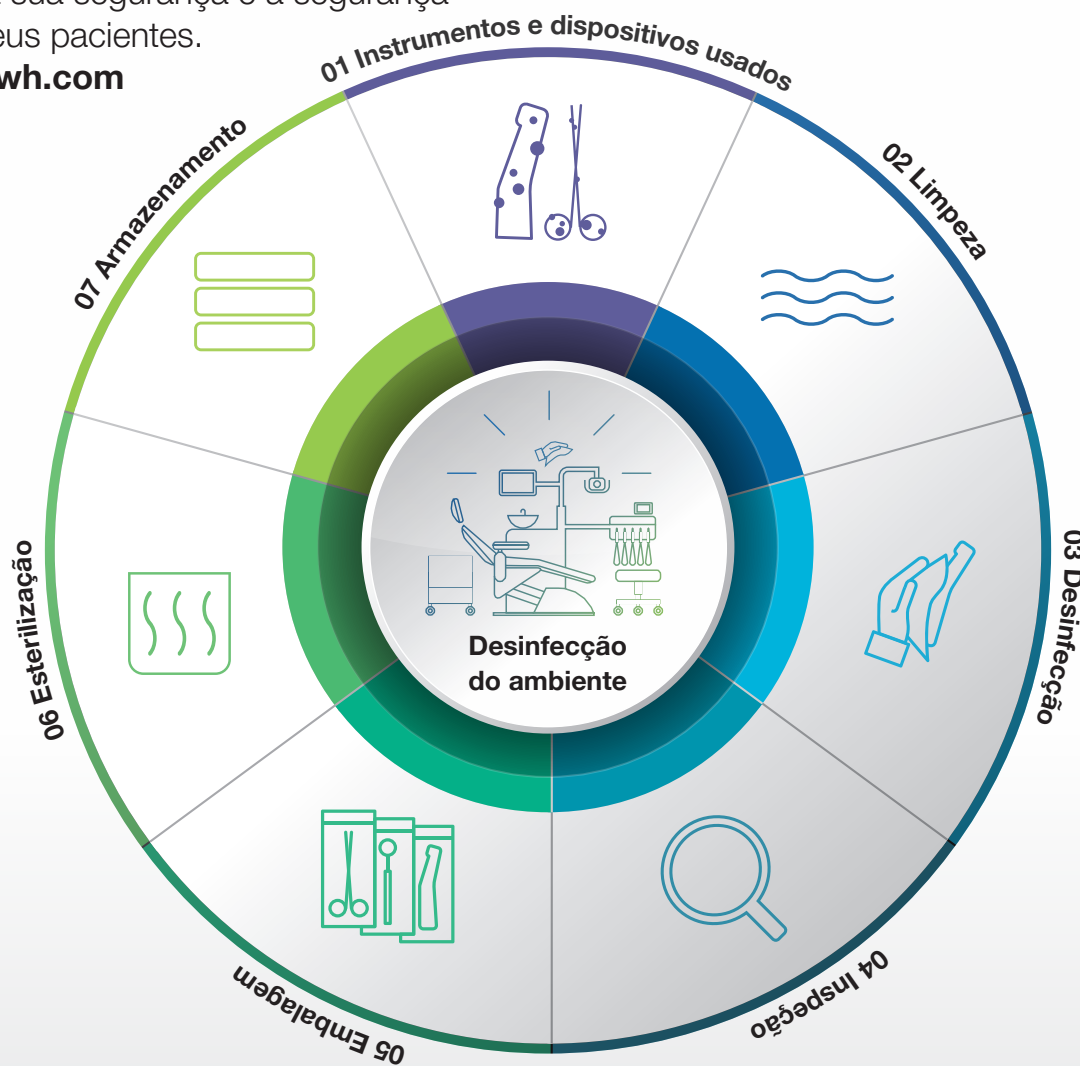

### Fabricante:

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
5111 Bürmoos, **Austria**  
t +43 6274 6236-0  
f +43 6274 6236-55  
office@wh.com  
**wh.com**

Imagens meramente ilustrativas. Acessórios e equipamentos adicionais não estão incluídos no material fornecido.

20313 APOB Rev. 003 / 09.12.2025  
Sujeito a alterações