

#whdentalwerk



video.wh.com

Ora disponibile presso
il vostro rivenditore
o su **wh.com**



Acqua demineralizzata per tutte le sterilizzatrici



multidem


Trattamento dell'acqua di nuova generazione

Fate vostri i numerosi vantaggi offerti dall'installazione del nuovo sistema di trattamento dell'acqua Multidem W&H.

Multidem fornisce acqua demineralizzata di alta qualità per la generazione di vapore nell'autoclave. Garantisce prestazioni ottimali e costanti allungando la vita delle sterilizzatrici o altri dispositivi di ritrattamento. Multidem è inoltre dotato di pistola a spray ed è quindi particolarmente indicato per il risciacquo degli strumenti prima della sterilizzazione.



Massima semplicità di impiego

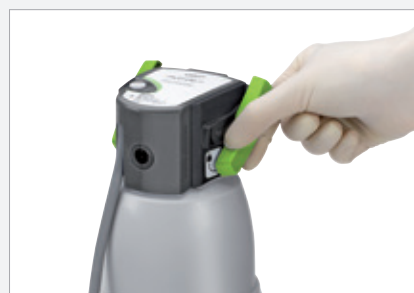

1. Per sostituire la cartuccia esaurita, aprire la manopola di bloccaggio.




2. Ruotare la manopola di bloccaggio fino all'arresto, premere la testina di risciacquo per scaricare la pressione e togliere l'elemento portafiltro dalla cartuccia esaurita.



3. Dopo aver tolto il cappuccio di protezione, inserire verticalmente l'elemento portafiltro su una nuova cartuccia. Multidem è già pronto per l'uso.

Compatibile con tutte le apparecchiature

Il sistema di produzione di acqua demineralizzata è utilizzabile anche per numerose autoclavi e apparecchiature di ritrattamento tradizionali.

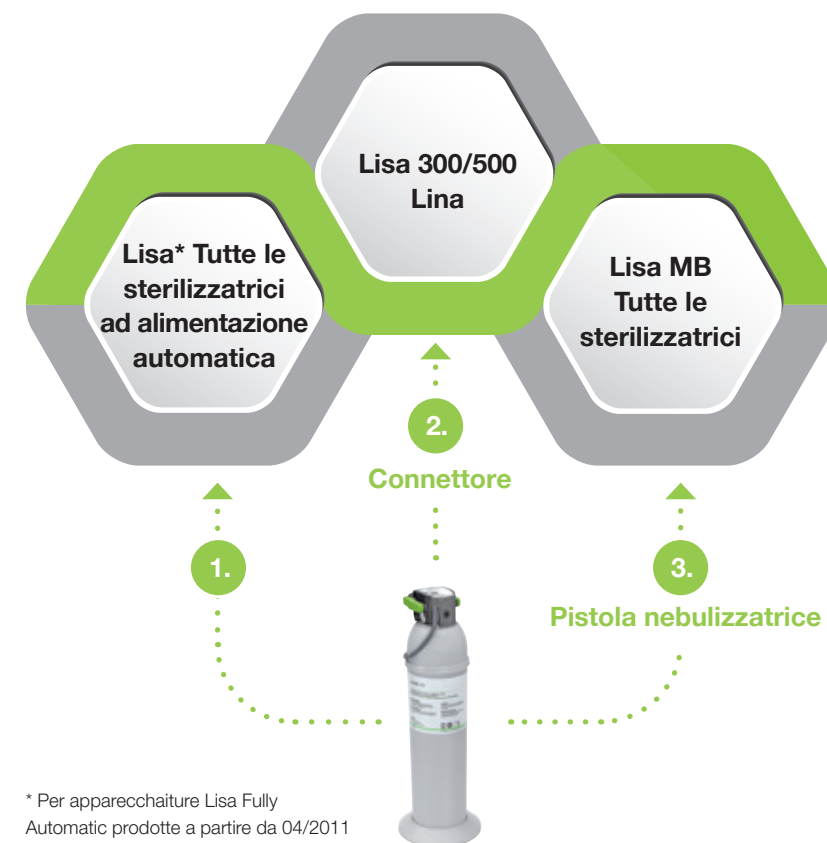

1. Collegamento diretto

Multidem può essere collegato direttamente con la sterilizzatrice Lisa Fully Automatic e tutte le sterilizzatrici ad alimentazione automatica.

2. Connettore

Le sterilizzatrici Lisa 300 e 500 e Lina possono essere collegate con Multidem tramite un apposito connettore (SAT/Water-Supply-Kit).

3. Riempimento manuale

La sterilizzatrice Lisa MB e tutte le sterilizzatrici prive di alimentazione automatica possono essere riempite tramite la pistola a spray.

Tutti i vantaggi in un colpo d'occhio

Semplicità d'uso

- › La sostituzione della cartuccia è rapida e non richiede utensili
- › Il posizionamento della cartuccia non deve essere fissato

Compatibilità


- › Utilizzabile per autoclavi e apparecchiature di ritrattamento convenzionali
- › Utilizzo flessibile in combinazione con la pistola a spray

Economia

- › Non occorre collegamento elettrico
- › Resina a scambio ionico ottimizzata

Sicurezza

- › L'acqua depurata corrisponde agli standard prescritti per il funzionamento di sterilizzatrici a vapore ed il ritrattamento di strumenti
- › Qualità dell'acqua costante, nessuna formazione di depositi calcarei

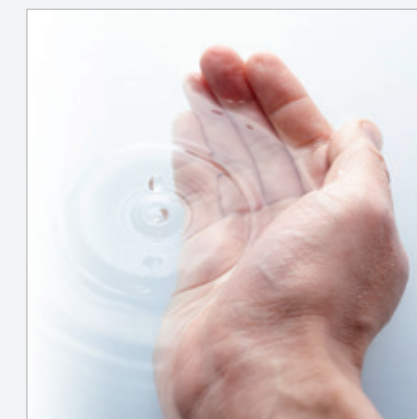

Dati tecnici

Tipo:	Multidem C27
Principio per il trattamento dell'acqua:	Demineralizzazione
Collegamento diretto con la sterilizzatrice:	Sì
Numero di sterilizzatrici collegabili:	Fino a 2 unità
Possibilità di riempimento manuale:	Sì (pistola spray)
Acqua demineralizzata in accordo alla norma EN 13060, ANSI/AAMI ST55:	Sì
Qualità dell'acqua (in entrata):	Acqua potabile
Qualità dell'acqua (in uscita):	0,5–2 µS/cm
Pressione dell'acqua (min/max):	2–8,6 bar
Temperatura dell'acqua (in entrata):	4–30 °C/40–86 °F
Acqua prodotta:	60 l/h
Dimensioni dispositivo (l × a × p):	12,4 × 12,3 × 47,6 cm
Peso:	2,7 kg
Posizione di funzionamento:	Verticale
Alimentazione elettrica esterna necessaria:	No
Valvola di sicurezza Water Block®:	Sì
Dispositivo antiritorno in accordo alla norma EN 1717:	Sì
Dotazione:	Testa del filtro, cartuccia, tubi e innesti (incl. Water Block®), pistola erogatrice (opzionale)

Nel caso di collegamento in serie prestare attenzione alla presenza di un sistema antiriflusso secondo le direttive, norme e prescrizioni locali vigenti.

Distribuzione:

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), **Italy**
t +39 035-66 63 000
f +39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com

W&H Italia S.r.l.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), **Italy**
t +39 035 66 63 911
f +39 035 06 62 504
office.it@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com