

#whdentalwerk



video.wh.com

Agora no seu
fornecedor ou
em **wh.com**



A água mais pura para todos os sistemas



multidem


Nova geração de unidades de purificação de água

Aproveite ao máximo as múltiplas vantagens oferecidas pela instalação do novo sistema de purificação de água Multidem da W&H.

Multidem fornece água desmineralizada de elevada qualidade para a geração de vapor em autoclave. Assim, garante-se um desempenho uniforme e óptimo, prolongando desta forma a vida útil do seu esterilizador ou dispositivo de purificação. Além disso, o aparelho está equipado com uma pistola de pulverização e adequa-se perfeitamente à lavagem de instrumentos antes da esterilização.



Operação e utilização simples

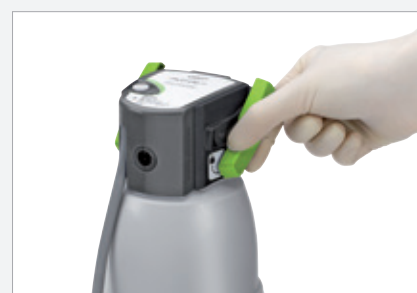

1. Para substituir um cartucho de filtro usado, abra a pega de bloqueio.



2. Rode a pega de bloqueio até ao encosto, prima o botão de limpeza para libertar a pressão e retira a cabeça do filtro do cartucho de filtro usado.



3. Depois de ter retirado a capa de protecção, coloque a cabeça do filtro verticalmente no novo cartucho. E assim o Multidem volta a ficar completamente funcional.

Compatível com todos os aparelhos

O sistema de purificação de água também é apropriado para ser usado com vários autoclaves convencionais e dispositivos de purificação.



1. Ligação directa
Multidem pode ser ligado directamente ao esterilizador Lisa Fully Automatic e a todos os esterilizadores com enchimento automático.

2. Com uma peça de ligação
Com uma peça de ligação (SAT/kit de enchimento de água) é possível ligar os autoclaves Lisa, Lisa 300 e 500 e Lina ao Multidem.

3. Enchimento manual
O esterilizador Lisa MB e todos os esterilizadores sem enchimento automático, podem ser enchidos com a pistola de pulverização.

Todas as vantagens em resumo

Utilização fácil

- › Substituição rápida de cartucho, sem ferramentas
- › O cartucho pode ser colocado sem dispositivo de fixação

Compatível


- › Compatível com autoclaves e dispositivos de purificação comuns
- › Utilização flexível com a pistola de pulverização

Económico

- › Não é necessário ligar à corrente
- › Resina de troca de iões optimizada

Seguro

- › A água purificada corresponde às recomendações e requisitos para a utilização de esterilizadores a vapor e para a preparação de instrumentos
- › Qualidade elevada e consistente da água, sem depósitos de calcário

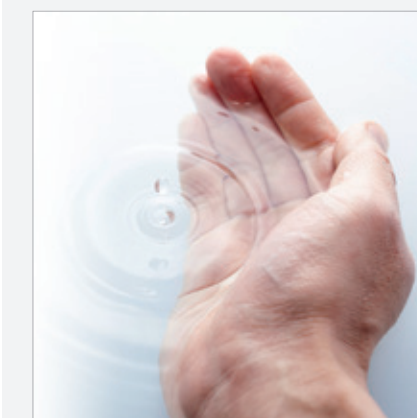

Especificações técnicas

Tipo:	Multidem C27
Princípio do tratamento da água:	Demineralização
Ligação direta ao esterilizador:	Sim
Número de esterilizadores que podem ser ligados:	Até 2 aparelhos
Possibilidade de enchimento manual:	Sim (pistola de pulverização)
Água desmineralizada em conformidade com as normas EN 13060 e ANSI/AAMI ST55:	Sim
Qualidade da água de entrada:	Água corrente
Qualidade da água saída:	0,5–2 µS/cm
Pressão da água (mín./máx.):	2–8,6 bar
Temperatura de entrada da água:	4–30 °C / 40–86 °F
Água produzida:	60 l/h
Dimensões do aparelho (L x A x P):	12,4 x 12,3 x 47,6 cm
Peso:	2,7 kg
Posição de funcionamento:	Vertical
Ligação à corrente necessária:	Não
Válvula de segurança Water Block®:	Sim
Bloqueio de refluxo em conformidade com a norma EN 1717:	Sim
Relação do material fornecido:	Cabeça do filtro, cartucho, tubagens e ligações (incl. Water Block®), pistola de pulverização (opcional)

No caso de aparelhos ligados posteriormente, assegure-se de que existe o respectivo bloqueio contra refluxos de acordo com as directivas, normas e especificações do seu país.

Distribuição:

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), **Italy**
t +39 035-66 63 000
f +39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com

Wehadent Ibérica S.L Unipersonal
C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, **Espana**
t +34 96 353 20 20
oficinas.es@wh.com
wh.com