

#whdentalwerk



video.wh.com

Вече при Вашия
дистрибутор или
wh.com



Електрически микромотор

Функционалността среща комфорт

Мощен.

Многофункционален.

Малък.



Перфектен баланс ОТ МОЩНОСТ И ЕРГОНОМИЯ

Безчетковият електрически микроmotor от W&H пленява с функционалност и комфорт. Той е изключително малък и изненадващо лек, приляга удобно в ръката и в допълнение към постоянно високата мощност, прави впечатление със своите характеристики, като LED технология, дълъг експлоатационен живот и тиха работа.



Особено малък

Сравнението показва: W&H електрическите микроmotorи не са по-големи от кутия кибрит.

25 % по-леки, 15 % по-къси:

За значително по-къса и осезаемо по-лека цяла система комбинирайте EM-12 L и EM-11 L с обратни наконечници от асортимента на Synea Vision Short Edition. Така се изпълняват и най-високите ергономични изисквания и се предотвратява умората, дори при по-дълга работа.



Съвместим

ISO къс куплунг: Използваем с всички актуални прави и обратни наконечници и къса версия.



Оптimalно балансиран

Къси, тънки и леки: с идеалното разпределение на теглото електрическите микроmotorи от W&H седят оптимално балансираны в ръката.



Постоянно висока мощност

Силна мощност, надеждна издръжливост и широк диапазон обороти от 100 до 40 000 rpm.




По-добра видимост с LED - светлина

Интегрираната в микроmotorа LED - технология дава възможност за осветяване на мястото на приложение като през деня.



Не се нуждае от поддръжка и поддържа висока цена

Намалени разходи за сервиз и поддръжка при повишен експлоатационен живот благодарение на безчетковото задвижване.

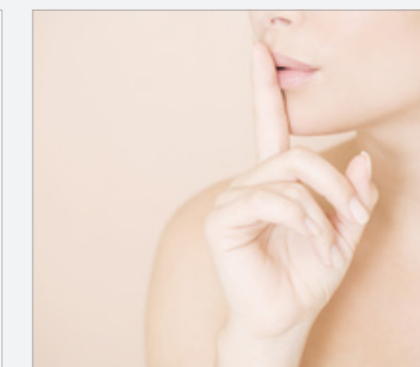


Тих и с ниски вибрации

Особено тих е поради техника за задвижване, управлявана чрез сензори и в повечето случаи с ниски вибрации.

Многобройни приложения и електрическа мощност

Извършване на препарация, екскавиране, полиране и с EM-12 L също така ендодонтски манипулации: Изберете инструмент с трансмисия, настройте оборотите и работете с препоръчаната скорост за борера. За оптимални резултати от манипулацията и широк спектър на приложение.

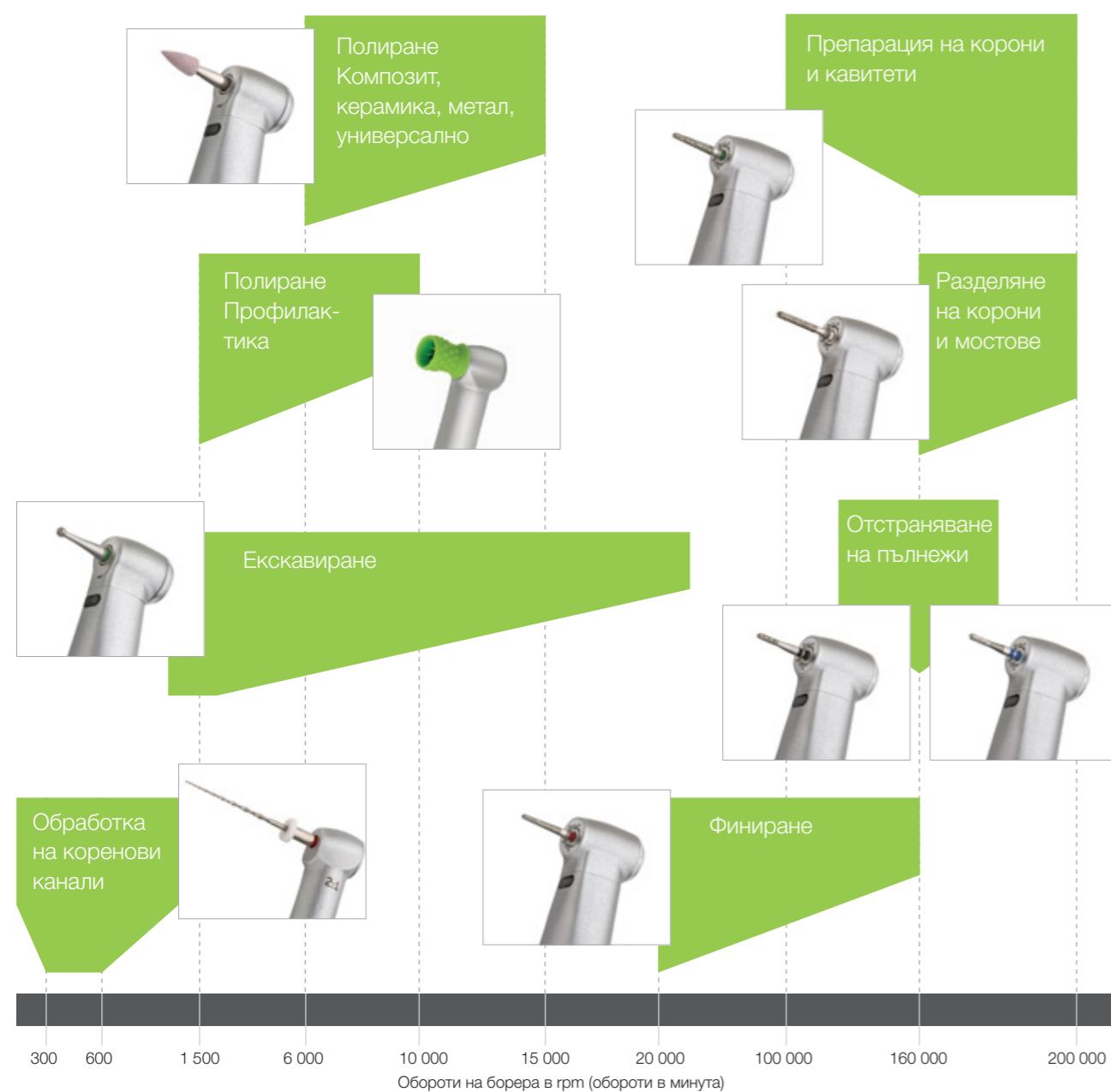

Една гениална система

Електрическият микромотор EM-12 L на W&H се интегрира оптимално към индивидуалния работен процес. Изберете допълнителния модул с гъвкави възможности за монтаж или използвайте предимствата на решенията за вграждане за удобна цялостна интеграция във Вашия дентален юнит.



Допълнителен модул
Ако използвате допълнителния модул като апарат за маса, тавата, която подлежи на стерилизация, предлага допълнителна повърхност за поставяне.



Подвижен дисплей
Дисплеят може да се сваля от допълнителния модул и да бъде позициониран независимо от модула за управление.



Възможност за монтаж
Можете да монтирате допълнителния модул също така под маса или странично на масата на денталният Ви юнит.



Решения за вграждане
Избрани производители на апарати предлагат двата електрически микромотора на W&H като напълно интегрирано решение за задвижване в рамките на цялостната система. Управлението се извършва просто и лесно чрез контролния панел на Вашия дентален юнит. Попитайте W&H или производителя на апарата Ви за портфолиото електрически микромотори като решения за вграждане.

Изборът е Ваш

Независимо дали с или без ендofункция EM-12 L говори за своя микромотор. Снабдете вашите апарати за манипулация с иновативни задвижвания и нови функционалности от W&N. Подходящи са: W&N прави и обратни наконечници за широка гама приложения.



Микромотор за вграждане с потенциометър

EM-12 L за възстановяване & протетика и профилактика може да бъде настроен с обхват на оборотите от 2 000 до 40 000 rpm.



Микромотор за вграждане с дисплей

Лесното управление с дисплея дава възможност за прецизна настройка на оборотите.



Комплект за вграждане с два микромотора

Един дисплей, два микромотора и по този начин винаги точния обратен наконечник на разположение за Вашите високо и нискоскоростни приложения.

Ендо системи за всякакъв случай

Ендо системите W&N за машинна обработка на коренови канали за още по-безопасна и точна препарация.



Интегрирана ендо функция

Повишете възможностите си за манипулация. Интегрираният EM-12 L с ендо функция предлага обхват на оборотите от 100 до 40 000 rpm. Риска от отчупване при пилене се минимизира чрез електронният контрол на въртящият момент.

Технически данни



Електрически микромотор	EM-12 L	EM-11 L
Обхват на оборотите*:	100–40 000 об/мин	2000–40 000 об/мин
Максимална мощност:	59 W	
Дължина (ефективна, без ISO-връзка):	31,55 mm	
Тегло:	57 g	
Ниво на шума:	43 dB (A)	
Светлина:	LED	
Спрей:	интегриран	
Въздух за охлаждане:	6 – 8 l/min	
Посока на въртене:	Ляв/десен ход	
Куплунг на инструмента:	съвместим с ISO 3964 (къс)	
Гаранция:	24 месеца	
Ендо функция:	Да	Не

* Обхват на оборотите в зависимост от варианта на микромотора/системата



Допълнителен модул за управление EM-12 L	MF-100
Обхват на оборотите:	2000–40.000 об/мин
Мрежово напрежение:	100–240 V, 47–63 Hz
Размери (височина x ширина x дълбочина):	92 x 156 x 211 mm
Тегло:	1,06 kg
Гаранция:	24 месеца



EM-11 L вграден комплект

EM-11 L е най-новото напълно интегрирано задвижващо решение от W&N. Проектиран специално за възстановителни и протетични приложения, той също така разполага с LED светлина и е също толкова малък, лек, тих, мощен и издръжлив като EM-12 L.



Електрически микроmotor EM-12 L

Функционалността среща комфорт



Made in
AUSTRIA

Експертен съвет

Д-р Серджо Ариосто Ернандес Делгадо

гр. Мексико, Мексико

Най-добрият избор за подготовката на снабдяване CAD/CAM е електрически микроmotor с високооборотен обратен наконечник:

„Според моя опит най-добрите предимства са: Контрол на препарацията. Прецизни, чисти и еднакви граници, които са лесни за сканиране. По-малко вибрации в сравнение с турбините и поради това по-малко умора и прилагане на усилие по време на препарация.“

Прочете интервюто на wh.com

Производител:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Дистрибуция:

W&H Bulgaria Ltd.
14 Svilenitsa Str.
1463 Sofia, **Bulgaria**
t +359 2 8549565, +359 2 8549566
f +359 2 8549590
office.bg@wh.com
wh.com

Фиг. снимки. Допълнителното оборудване и съдържанието на показаните аксесоари не са включени в съдържанието на доставката.

20455 ABG Rev. 002 / 27.02.2024
Правата за промени запазени