

Simple, efficace, rapide.

Assistina Twin désormais avec Quick Connect by W&H.



La lubrification

en un temps record

Vos instruments n'ont jamais été entretenus aussi rapidement qu'avec l'Assistina Twin. Grâce à la technologie innovante de la nébulisation, W&H bat tous les records en raccourcissant la durée d'entretien à 10 secondes. Pour un entretien rapide et un résultat inégalé.

Un système innovant

L'huile est nébulisée avant d'être soufflée à haute pression dans l'instrument. Cette opération élimine encore mieux les salissures présentes à l'intérieur de l'instrument. La fine nébulisation atteint les angles les plus inaccessibles des éléments de transmission sans devoir les déplacer. Tous les aérosols sont éliminés des cuves par une aspiration active et le filtre HEPA intégré.

Un atout

dans tous les cabinets dentaires

L'Assistina Twin répond à toutes les exigences de votre cabinet. Il est capable de traiter jusqu'à 360 instruments par heure grâce à son procédé innovant et sa rapidité de traitement, mais aussi son design ergonomique et son vaste choix d'adaptateurs.

Dr Christian MüllerDentiste libéral

« J'ai désormais la certitude que mes instruments peuvent être traités entre deux traitements, sans aucune attente, ni pour mes patients ni pour moi. C'est un véritable plus pour mon cabinet. »



Une technologie révolutionnaire

Lubrification minutieuse et complète des éléments de transmission (orange) et nettoyage des canaux de spray (vert) grâce à la technologie innovante de la nébulisation.



Assistina Twin avec Quick Connect by W&H

L'Assistina Twin de W&H est unique parmi les appareils d'entretien : avec son système à deux cuves innovant, la lubrification en un temps record et le Care Set respectueux de l'environnement, il séduit sur toute la ligne.

L'Assistina Twin est désormais complété par un adaptateur innovant : le Quick Connect by W&H. Ce système d'adaptateur vous offre encore plus d'avantages pour votre travail quotidien au cabinet.

Quick. Click. Check.

Utilisation ais

Le bouton de déverrouillage permet une connexion et une déconnexion encore plus faciles et rapides des porte-instruments dynamiques.

Changement rapide d'adaptateur

Grâce à une préparation optimale : les différents adaptateurs peuvent être préparés en dehors de l'appareil, avant et pendant le processus d'entretien.

Plus de flexibilité

En rassemblant les adaptateurs dont vous avez réellement besoin.

Méthodes de travail améliorées

Grâce à l'utilisation simple et à la connexion rapide avec les adaptateurs Quick ISO ou Quick RM.





L'adaptateur innovant pour porte-instruments dynamiques.

4

La lubrification

sans attente

Feu vert pour plus de durabilité : avec l'Assistina Twin, les temps d'attente lors de la lubrification font désormais partie du passé. Il s'agit du premier appareil de traitement équipé de deux cuves utilisables alternativement et permettant un chargement continu. Un traitement serein, plus efficace que jamais!



« Stupéfiant ! Grâce au système à deux cuves, je traite les instruments en un clin d'œil. Silencieux, l'appareil affiche également un design attrayant. »



En toute fluidité



Adapté à

vos besoins

Grâce au Quick Connect by W&H intégré, l'Assistina Twin convient encore mieux à vos méthodes de travail et les rend encore plus efficaces. Pourquoi ? Parce que vous pouvez équiper l'appareil d'entretien en utilisant exactement les adaptateurs dont vous avez besoin pour vos porte-instruments dynamiques.



Quick RM pour turbines.





Quick ISO pour pièces à main et contre-angles.





Le changement rapide et facile d'adaptateur permet d'optimiser vos méthodes de travail et d'augmenter l'efficacité de votre cabinet.

C'est vous qui décidez des adaptateurs dont vous avez réellement besoin. Équipez votre Assistina Twin en fonction de vos besoins et dotez les deux cuves uniquement des adaptateurs qui vous conviennent.








Pour les autres adaptateurs et une vue d'ensemble complète sur les systèmes, scannez le **QR code**:

8

Lubrification optimale

et consommation minimale

Grâce à la surveillance intelligente du processus, l'Assistina Twin effectue un entretien toujours minutieux tout en consommant peu. L'Assistina Twin Care Set ne se remplace que tous les 2 800 instruments traités. Vos instruments sont entretenus rapidement et en toute sécurité, mais également à moindres coûts.

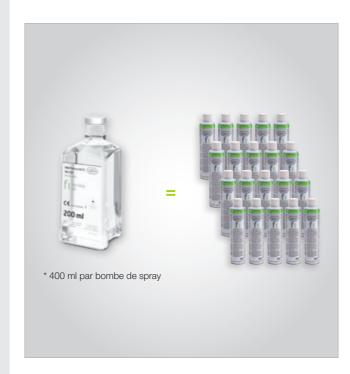

Assistina Twin Care Set
Capacité identique à 20 bombes de spray*





Twin Care Set
Comprend une cartouche de
solution de nettoyage, une
cartouche d'huile Service Oil
F1 et un filtre HEPA. Tous les
consommables se remplacent
facilement et sans outil.

Traitement

complet

La stérilisation, l'hygiène et l'entretien sont toujours plus importants au sein du cabinet dentaire. W&H propose des protocoles d'hygiène conformes aux bonnes pratiques sous forme de solution complète pour le traitement de vos instruments et de vos porte-instruments dynamiques.



Caractéristiques techniques

ϵ

Type:	MB-302 Assistina Twin
Processus:	Nettoyage des canaux de spray, lubrification
Convient pour :	Pièces à main et contre-angles, turbines, détartreurs à air et moteurs à air
Tension secteur :	100 – 240 V CA
Consommation maxi :	18 VA
Consommation d'air :	Env. 40 Nl/min
Pression de fonctionnement :	5 – 10 bar (réglage effectué par un régulateur de pression automatique intégré)
Dimensions (L x P x H):	297 x 435 x 190 mm
Poids:	3,5 kg
Capacité :	200 ml de solution de nettoyage W&H Activefluid 200 ml d'huile W&H Service Oil F1

Information réglementaire :

Dispositif Médical Classe 1 / CE 0297 / DQS. Réservé aux professionnels de la médecine dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation ou sur l'étiquetage du produit.

Fabricant:

Distribution:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1 5111 Bürmoos, Austria t +43 6274 6236-0 f +43 6274 6236-55 office@wh.com wh.com