

#niwop  
video.wh.com

Teraz u partnera  
handlowego lub na  
stronie **wh.com**



# Wolność

w polerowaniu  
rotacyjnym



**proxeo** <sup>TWIST</sup> **Cordless Polishing System**

## Nieograniczona swoboda

Proxeo Twist Cordless: Czyszczenie i polerowanie powierzchni zębów i wypełnień bez ograniczeń – i to pod wieloma względami. System składający się z indywidualnych dla każdego pacjenta nasadek DPA Prophy, prostnicy oraz bezprzewodowego sterownika nożnego umożliwia swobodę ruchów podczas polerowania zębów, której nic nie ogranicza. Prostnica jest lżejsza od wielu modeli smartfonów, co w połączeniu z ergonomiczną konstrukcją zapewnia doskonałe odwzorowanie ruchów ręki. Zabieg polerowania jest bardziej przyjazny dla mięśni operatora, a dotarcie do trudno dostępnych miejsc w jamie ustnej jest łatwiejsze z zachowaniem znakomitej widoczności opracowywanego miejsca.



### Łatwiejsza adaptacja niż kiedykolwiek do tej pory

Bezprzewodowa prostnica o ergonomicznym kształcie, którą w bardzo łatwy sposób można obracać w dłoni o 360°, zapewnia dynamiczne dopasowanie pozycji pracy do warunków zabiegu.




### Komfort dla kręgosłupa

Bez kabli możesz zwrócić większą uwagę na ergonomiczną i przyjazną dla pleców postawę. Obciążenia spowodowane ciągnięciem kabla to już przeszłość.



### Zawsze pod stopą

Bezprzewodowy sterownik nożny pozwala na swobodne i szybkie przemieszczanie się wokół pacjenta przy zachowaniu ergonomicznej postawy i wygody sterowania bezprzewodową prostnicą.

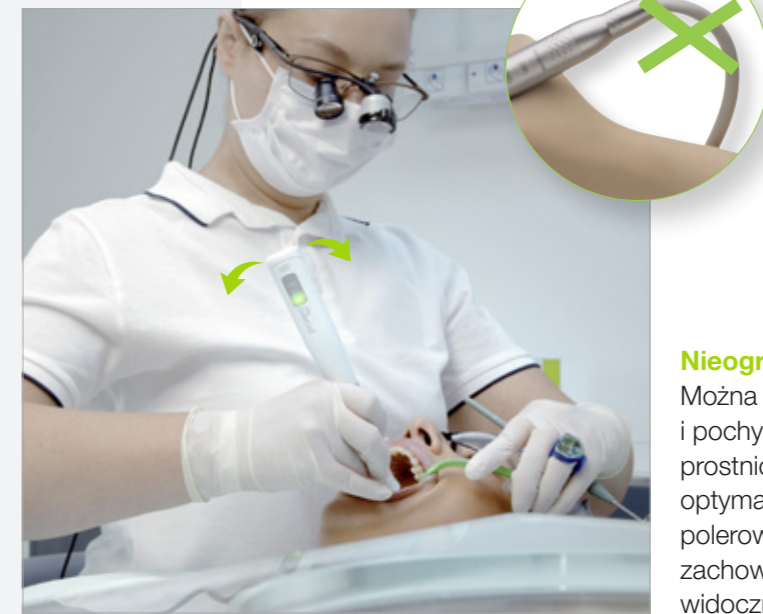

### Nieograniczona swoboda

Można bez ograniczeń obracać i pochylać bezprzewodową prostnicę tak, aby uzyskać optymalny dostęp do polerowanego miejsca przy zachowaniu znakomitej widoczności.




### Jeszcze łatwiej

Wraz z nasadką DPA Prophy prostnica nie jest nawet w połowie tak ciężka, jak wiele silników przewodowych z kątnicą zwalniającą – dla jeszcze większego komfortu podczas polerowania.



### Niezawodne rozwiązanie

Płynna regulacja obrotów, którą zapewnia bezprzewodowy sterownik nożny, pozwala na dostosowanie prędkości obrotowej gumki do sytuacji klinicznej. Wydajne i trwałe akumulatory litowo-jonowe umożliwiają długą pracę.

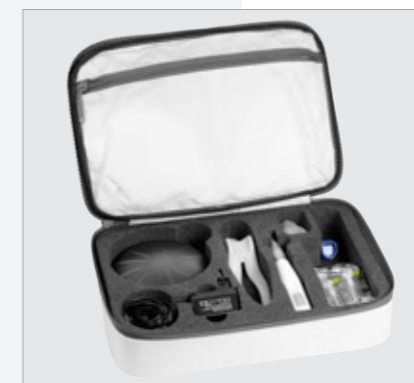

### Zawsze pod ręką

Bezprzewodowy system do polerowania Proxeo Twist Cordless Polishing umożliwia przeprowadzanie zabiegu praktycznie w każdym miejscu. Specjalne etui zabezpiecza system przed uszkodzeniem i pozwala na jego bezpieczne przenoszenie. Przechowuj sprzęt w łatwy sposób w praktycznej torbie transportowej i zabierz go ze sobą na następny zabieg.

## We współpracy ze specjalistami Prophy

Do akumulatorowego systemu do polerowania Proxeo Twist Cordless Polishing W&H oferuje odpowiednie nasadki DPA Prophy o różnych twardościach. Zostały one zaprojektowane wspólnie z użytkownikami Prophy. W procesie tym dużą wagę przykładano do takich właściwości, jak optymalna adaptacja, proste wchłanianie i rozprowadzanie pasty oraz delikatne czyszczenie aż do zagłębienia.



**Gładka powierzchnia na krawędzi**  
do delikatnego oczyszczania aż do bruzd.



**Zewnętrzne wypustki**  
redukcją rozpryskiwanie pasty i jednocześnie polerują przestrzeń międzyzębową.



**Specjalne wewnętrzne lamelki**  
do łatwego pobierania i skutecznego rozprowadzania pasty.



**Mała główka i wąska szyjka**  
zapewniają optymalny widok wokół miejsca zabiegu i lepszy dostęp do trudno dostępnych miejsc, takich jak obszary trzonowe i guzowate w szczęce.



**Optymalna adaptacja**  
Kielichy nasadek DPA Prophy dokładnie wpasowują się w powierzchnię zębów.



**Dobre wrażenie**  
Indywidualne nasadki DPA są pojedynczo pakowane w przezroczyste opakowania i otwierane bezpośrednio przy pacjencie.

## Niespotykana lekkość podczas **polerowania**

### To jest proste, takie proste...

Bezprzewodowa prostnica z indywidualną nasadką z gumką jest nawet o połowę lżejsza od konwencjonalnego połączenia takiego jak mikrosilnik unitu z założoną kątnicą zwalnającą. Lekka, nie męczy – większy komfort i większa precyzja ruchów podczas zabiegu.



### Praktyczna podstawa

Można w niej łatwo umieścić prostnicę pomiędzy zabiegami lub w celu naładowania.



### Prosta higiena

Gładka powierzchnia zapewnia maksymalną higienę. Wystarczy przetrzeć prostnicę środkiem dezynfekującym. Metalowa tuleja może być usunięta i wysterylizowana lub poddana dezynfekcji termicznej.

## Dane techniczne

<b>Nasadka DPA</b>	⊗ Nie nadaje się do ponownego użycia <b>LATEX</b> Nie zawiera lateksu
<b>Kąt:</b>	105°
<b>Połączenie:</b>	Doriot
<b>Twardości:</b>	miękka / kolor zielone jabłko twarda / kolor ciemnozielony

CE  
0297

Bezprzewodowa prostnica	PL-40 H
<b>Ciężar:</b>	118 g
<b>Maksymalna prędkość obrotowa:</b>	3.000 min <sup>-1</sup>
<b>Maksymalny moment obrotowy:</b>	2 Ncm
<b>Wymiary (szer. x gł. x wys.):</b>	160 x 25 x 28 mm
<b>Typy akumulatorów:</b>	litowo-jonowy
<b>Czas eksploatacji przy pełnym naładowaniu:</b>	8 zabiegów z polerowaniem po 6 minut każdy
<b>Tryb czuwania:</b>	automatycznie po 4 min
<b>Czas ładowania:</b>	do pełnego naładowania (100%) ok. 2 godziny do częściowego naładowania (50%) ok. 30 min

### Zdemontowana tuleja:

☒ Możliwość termodezynfekcji ☒ Możliwość sterylizacji

Bezprzewodowy sterownik nożny	C-NW
<b>Ciężar:</b>	190 g
<b>Wymiary (szer. x gł. x wys.):</b>	117 x 117 x 38 mm
<b>Typy akumulatorów:</b>	litowo-jonowy
<b>Czas eksploatacji przy pełnym naładowaniu:</b>	2 miesiące
<b>Tryb czuwania:</b>	automatycznie, jeżeli nie jest używany
<b>Czas ładowania:</b>	ok. 3 godziny



## Bernhard Eder

Manager ds. produktu W&H, Bürmoos


„Bezprzewodowy Proxeo Twist oferuje większą swobodę ruchu i komfort podczas zabiegu. Szczególną uwagę zwróciliśmy na ciężar. W porównaniu z kątnicą z mikrosilnikiem elektrycznym Proxeo Twist waży mniej niż połowę, zmniejszając zmęczenie nadgarstka podczas polerowania.”



## Monika Riedl

Higienistka stomatologiczna, Monachium

„Bezprzewodowy Proxeo Twist eliminuje nieprzyjemne napięcia i wynikające z nich bóle, zwykle spowodowane napięciami kabla.”

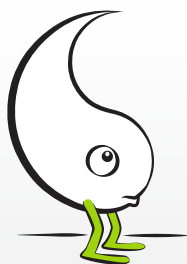

Implantology  
without **Periodontology** is  
like **Yin** without **Yang**.



**#NIWOP:** Systematyczny i oparty na badaniach naukowych przebieg pracy

### Producent:

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
51111 Bürmoos, **Austria**  
**t** +43 6274 6236-0  
**f** +43 6274 6236-55  
office@wh.com  
**wh.com**

### Dystrybutor:

**W&H Poland Sp. z o.o.**  
ul. Tukana 3 B  
02-843 Warszawa, **Polska**  
**t** +48 22 3318000  
**f** +48 22 3318001  
biuro@wh.com  
**wh.com**