

#niwop



video.wh.com

Ahora en su  
distribuidor o  
en **wh.com**



# Ultrabrillante

Los Piezo Scalers

Proxeo Ultra de W&H



proxeo ULTRA





### Depósito ultragrande

Con una capacidad de 750 ml, el depósito del Proxeo Ultra es uno de los más grandes del mercado. Encaja perfectamente con la estética de su diseño y, gracias a su forma especial y a su amplia abertura, puede llenarse y limpiarse de forma fácil y cómoda.



### Superficies ultralisas

El Proxeo Ultra se puede desinfectar fácilmente con un paño gracias a su diseño sin cantos y a sus superficies lisas.



### Libertad de movimientos ultraflexible

Nunca antes había sido tan fácil cambiar de posición. Coloque el pedal de control inalámbrico en el lugar que más le convenga, sin molestos cables.



### Detección automática de nivel ultrapráctica

El Proxeo Ultra PB-530 le avisa con antelación cuando el agua se está acabando. De este modo, podrá incorporar cómodamente el rellenado a su proceso de trabajo.



### Iluminación ultraluminosa

El anillo LED proporciona una iluminación similar a la luz del día en el área de tratamiento.



### Pieza de mano ultraergonómica

Diseño estilizado y manguera ultraflexible para una fácil adaptación, un equilibrio perfecto y una mayor comodidad para el usuario.



### Ajuste de potencia ultrasuave

El modo básico puede ajustarse fácilmente con el regulador giratorio.

## Sistemas de Proxeo Ultra

### PB-530

- › Compatibilidad con marcapasos comprobada por la Universidad Técnica de Graz
- › Pieza de mano con anillo LED
- › Manguera fina y flexible
- › Pedal de control inalámbrico
- › Detección automática de nivel
- › Ajuste de potencia continuo
- › Gama de puntas perfectamente adaptada
- › Depósito grande (750 ml)
- › Programa de limpieza especial para la preparación de sistemas de mangueras



### PB-520

- › Compatibilidad con marcapasos comprobada por la Universidad Técnica de Graz
- › Pieza de mano con anillo LED
- › Manguera fina y flexible
- › Ajuste de potencia continua
- › Gama de puntas perfectamente adaptada
- › Depósito grande (750 ml)



### PB-510

- › Compatibilidad con marcapasos comprobada por la Universidad Técnica de Graz
- › Pieza de mano con anillo LED
- › Manguera fina y flexible
- › Ajuste de potencia continuo
- › Gama de puntas perfectamente adaptada



## Ultra como ultragenial

¡Así de fácil puede ser la eliminación del sarro! Las piezas de mano ergonómicas y ligeras, junto con el pedal de control inalámbrico, garantizan un manejo perfecto y la máxima flexibilidad durante cada tratamiento.



## Sistema de puntas compacto de alta calidad para Piezoscaler

Puntas universales y especiales desarrolladas con los usuarios finales y adaptadas a los requisitos clínicos de las distintas áreas de aplicación y los pasos individuales del tratamiento, así como a los requisitos técnicos de la tecnología piezoeléctrica de W&H.



### Puntas universales

- 1U, 2U, 3U, 4U
- 1US, 2US

Para eliminar el sarro supragingival en todos los cuadrantes.



### Punta Implant Clean

- 1I

Para una limpieza cuidadosa de implantes y de las correspondientes restauraciones.




### Puntas periodontales

- 1P, 3Pr/3PI, 4P, 5Pr/5PI

Para la terapia de periodontitis inicial y de apoyo.

## Aplicación versátil

Gracias al ajuste de potencia gradual, los Piezoscaler de W&H se configuran para cada aplicación y cada punta. Desde la profilaxis y la periodontología, pasando por la conservación de implantes o la endodoncia, hasta la micropreparación de restauraciones, las posibilidades de aplicación son extremadamente versátiles.

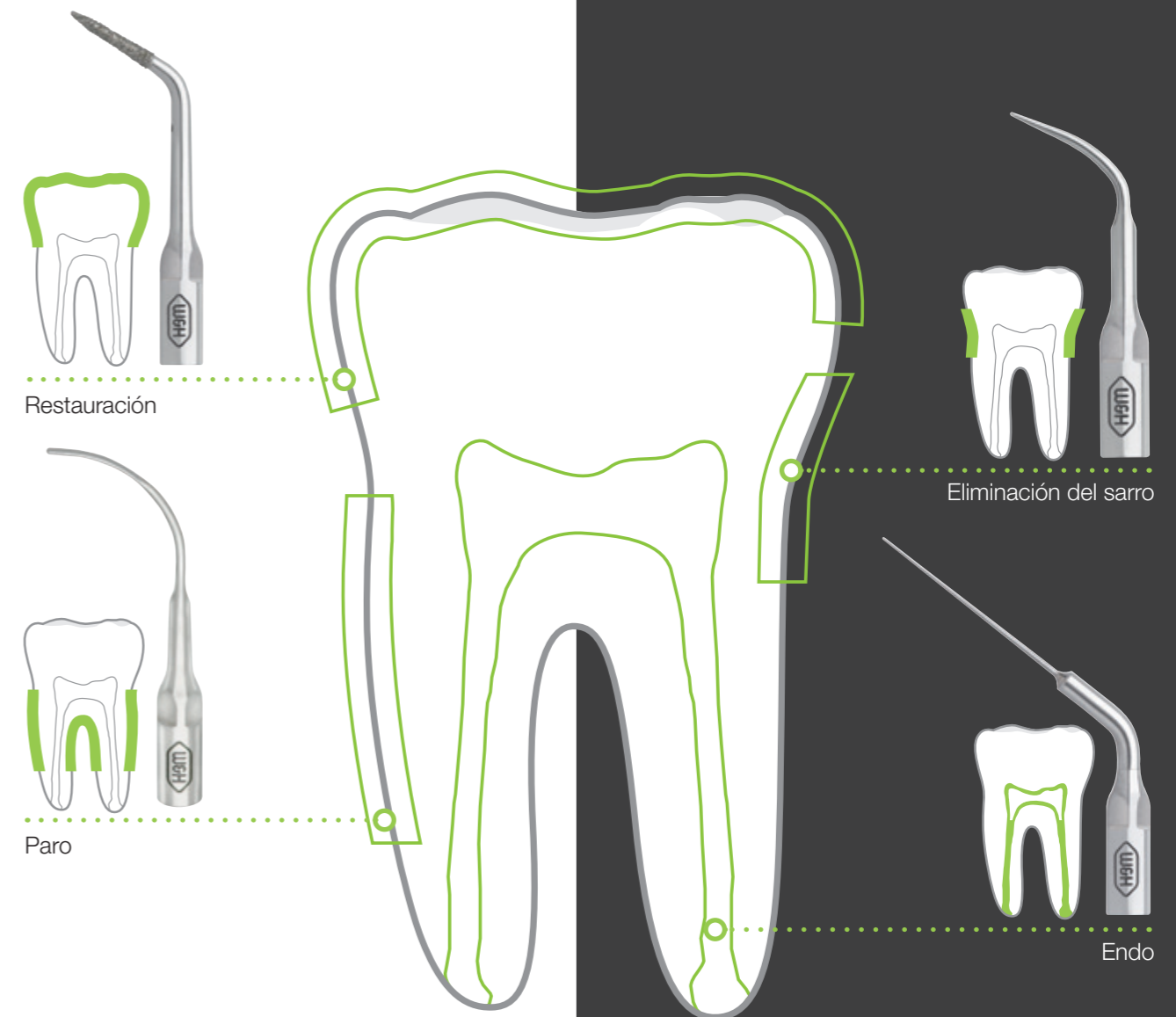

©Krapf-Romana

## Selección de primera

La Proxeo Ultra está disponible con dos tipos de rosca diferentes. El cambiador de puntas con el controlador de torque integrado evita un enroscado excesivo y permite un cambio de puntas sencillo y seguro.



compatible con W&H / EMS\* / Mectron\*

compatible con W&H / NSK\* / Satelec\*



### Barbara Schwark

Ponente sobre profilaxis

«¡Estoy encantada! ¡Queda claro que los Piezo Scalers de W&H son seguros para su uso en pacientes con marcapasos sin correr ningún riesgo!»

## Más seguridad para cada paciente

W&H es el primer fabricante que confirma el uso seguro de sus Piezo Scalers en pacientes con marcapasos. Con un informe independiente de la Universidad Tecnológica de Graz, los usuarios tienen ahora la seguridad que necesitan para el tratamiento profiláctico de pacientes con marcapasos.



## Compatibilidad de las puntas con las piezas de mano de W&H

	W&H/EMS/Mectron		W&H/NSK/Satelec*	
	PB-5 L	PB-3	PB-5 L S	PB-3 S
<b>Proxeo Ultra</b>	X		X	
<b>Integrado (Built-in)</b>	X	X	X	X

\* Las puntas W&H compatibles con rosca Satelec (p. ej. 1US, 2US) son compatibles con las piezas de mano PB-5 L S, PB-3 LED S y PB-3 S de W&H.

Nota: EMS®, Mectron®, NSK® und Satelec® son marcas de terceros que no guardan relación alguna con W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH. Al utilizar puntas de otros fabricantes, el usuario debe asegurarse de que los parámetros de rendimiento del equipo piezoeléctrico de W&H están ajustados correctamente.

### Solución integrada (Built-in)


Fabricantes de unidades seleccionados ofrecen los Piezo Scalers de W&H como solución de accionamiento integrada en el marco del sistema global. El uso se realiza de forma cómoda y sencilla a través de la central de control de su unidad dental. Consulte a W&H o al fabricante de su unidad para conocer más detalles sobre los Piezo Scalers de W&H como solución integrada.



## Datos técnicos Proxeo Ultra

Equipo	PB-530	PB-520	PB-510
Tensión de red:	100-230 V		
Máxima potencia de salida a la pieza de mano con carga (ultrasónica):	12 W		
Frecuencia (ultrasónica):	22-35 kHz		
Modo de funcionamiento:	S3 (14 s/6 s)		
Longitud del cable de la pieza de mano:	1,8 m		
Medidas en mm (An x Pr x Al):	120 x 185 x 205		120 x 185 x 110
Peso:	1106 g	1064 g	807 g
Apropiado para el pedal de control:	C-NW	C-NF	

Pedal de control	C-NW ((•))	C-NF
Peso:	190 g	114 g
Medidas en mm (An x Pr x Al):	117 x 117 x 38	100 x 110 x 28
Tipo de batería:	iones de litio	-
Autonomía con carga completa:	aprox. 2 meses	-
En espera:	automático cuando no se acciona	-
Tiempo de carga:	aprox. 3 horas	-

Pieza de mano Piezo Scaler 	PB-5 L	PB-5 L S
Luz:	anillo LED	
Peso:	55 g	
Longitud sin punta:	135 mm (con acoplamiento)	
Diámetro:	18,5 mm	

Conjunto integrado analógico	PB-3	PB-5 L
Piezo Controller:	PC-1.0	
Conjunto de conexión eléctrica:	✓	
Regulador giratorio:	✓	
Manguera de alimentación:	VP-3 (1,8 m)	VP-5 (1,8 m)
Pieza de mano:	PB-3	PB-5 L
Cambiador de puntas con punta montada:	TW-1: 1U, 1P	TW-1: 1U, 2U, 1P



### Lena Holztrattner

Gestor de cartera de productos de W&H, Bürmoos


«Los dentistas e higienistas desempeñaron un papel clave en este producto. Desde los requisitos hasta su diseño y fácil manejo, este producto satisface claramente las necesidades de los usuarios.»



### Fanny Bretschneider

Higienista dental, Salzburgo

«El Piezo Scaler Proxeo Ultra hace honor a su nombre. Permite un cambio de puntas ultrarrápido, tiene una pieza de mano ultraergonómica, es ultraflexible en su uso, ultrasencillo en su manejo y ultraversátil en el tratamiento. También es ultrabonito.»

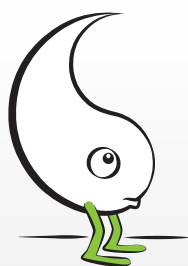

Implantology  
without **Periodontology** is  
like **Yin** without **Yang**.



**#NIWOP:** El flujo de trabajo sistemático y basado en la evidencia

#### Fabricante:

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
51111 Bürmoos, **Austria**  
**t** +43 6274 6236-0  
**f** +43 6274 6236-55  
office@wh.com  
**wh.com**

#### Distribución:

**Wehadent Ibérica S.L Unipersonal**  
C/Canónigo Tárrega, 33  
46014 Valencia, **España**  
**t** +34 96 353 20 20  
oficinas.es@wh.com  
**wh.com**