

#whdentalwerk



video.wh.com

Ahora en su
distribuidor o
en wh.com



Potente limpieza y desinfección



teon
teon +

Teon

El siguiente paso del reprocesamiento

El nuevo Teon es una termodesinfectadora altamente eficaz. Gracias a sus programas especializados, ofrece la mejor limpieza y desinfección para su clínica dental. Teon mejora la organización del trabajo en la sala de higiene, reduce el tiempo de reprocesamiento y aumenta la protección contra la contaminación cruzada.



Teon está disponible sin su interior, para que pueda adaptar el dispositivo según sus necesidades. Como con el **»paquete inicial«** (más información en la página 6).

teon

Teon +

La mejor estrategia de reprocesamiento

Teon +, la termodesinfectadora prémium de W&H, garantiza a las clínicas más exigentes un sistema de limpieza automático excelente para instrumentos. Teon + ofrece trazabilidad completa para cumplir con los requisitos normativos actuales. Su innovador sistema de secado de aire activo ofrece un nuevo estándar en cuestión de calidad y rendimiento.



Complete el Teon + con el equipo interior que realmente necesita. El dispositivo se vende vacío, pero puede equiparse a la perfección para sus necesidades individuales, como con el **»paquete de inyección«** (más información en la página 6).

teon +

Alto estándar para limpieza y reprocesamiento

Alta capacidad de cámara

Pantalla fácil de usar

Amplia selección de accesorios

Limpieza de piezas huecas

Limpieza de alto rendimiento

Cuidadoso con el material gracias a sus programas especializados

Trazabilidad y conectividad mediante módulo de Ethernet

Fiabilidad gracias a los elementos calefactores fuera de la cámara de lavado y la cámara completa

teon+

Ventajas adicionales de Teon +:

- > Ita calidad de secado para instrumentos delicados
- > Secado de aire activo con filtro HEPA



Superficie lisa y diseño moderno

Las nuevas termodesinfectadoras se distinguen por su rendimiento de alta calidad y, por lo tanto, garantizan un proceso de limpieza integral eficaz para instrumentos dentales. Gracias a su diseño moderno y elegante, pueden integrarse perfectamente en su sala de reprocesamiento.



Seguridad

El control del brazo de spray integrado permite unos resultados excelentes de reprocesamiento. La bomba de velocidad variable aumenta/disminuye la presión según el paso del proceso de reprocesamiento. El sistema de filtrado elimina las partículas de suciedad para prevenir obstrucciones en sus instrumentos.



Comodidad y ergonomía

El depósito de sal integrado en la puerta hace que reponerla sea fácil y cómodo. Gracias a su concepto ergonómico, no hay que quitar ninguna parte del equipo.



Cámara de enjuague para una higiene óptima

La cámara de enjuague permite un mayor rendimiento con una higiene y limpieza excelentes. Además, su tamaño óptimo permite una mayor capacidad por lote.



Fácil de usar


Su diseño moderno y su forma intuitiva de guiar al usuario hacen que sea especialmente fácil de manejar en la exigente rutina del reprocesamiento diario. El panel de control es fácil de manejar y es, también, la puerta de acceso.

Completo y versátil

El reprocesamiento puede ser tan sencillo como eficaz: con los accesorios óptimos.

1 – Cesta superior

Flexible para insertos y con altura regulable.

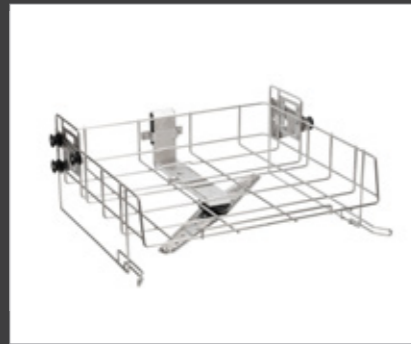

2 – Inserto

Destinado a distintos instrumentos y para uso flexible.



3 – Cesta inferior

Para sujetar las bandejas de rejilla, así como varios insertos.



4 – Inserto

Para acomodar varios instrumentos e insertos para la cesta superior e inferior.



»Paquete inicial« 1-6

Incluye el conjunto perfecto de equipo básico.

»Paquete de inyección« 3-8

Se complementa a la perfección con equipo adicional y es especialmente apropiado para las piezas de mano.




5 – Inserto

Diferentes compartimentos para una carga óptima de instrumentos verticales.



6 – Inserto

Equipado con diferentes compartimentos para una carga óptima.

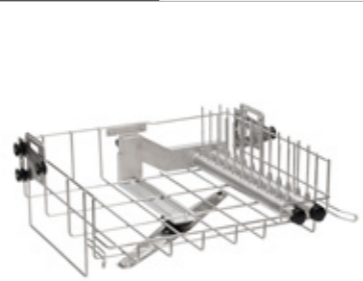

7-8 Cesta superior – Boquillas de inyector

Para varios instrumentos con boquillas de inyector.

Tenga en cuenta:

los dispositivos se venden vacíos. Añada el equipo adecuado para su dispositivo.



Datos técnicos

CE
0297

Tipo:	Teon	Teon +
Suministro eléctrico:	400 V AC; 50-60 Hz/230 V AC; 50-60 Hz	
Corriente:	16 A	
Dimensión total (al x an x p):	600 x 835 x 600 mm	
Espacio requerido para la instalación (al x an x p):	598 x 835 x 1.200 mm (en total con la puerta abierta)	
Peso (vacío):	74 kg	78 kg
Smart Dry:	•	-
Dry Plus:	-	•
Filtro HEPA:	-	•
Toma de agua fría:	•	•
Toma de agua caliente:	-	•
Toma de agua desmineralizada:	•	•
Cerrado automático – bloqueo automático de la puerta:	•	•
N.º de bombas dispensadoras integradas para productos líquidos:	2	1
Dosificador en la puerta para aclarado:	•	•
Depósito de sal – acceso en puerta frontal:	•	•
Número de programa:	5	6
N.º de programa personalizable:	2	2
Duración del ciclo*:	49'	74' incluyendo secado al aire activo
* Tiempo para el programa Vario TD Dental		

Las termodesinfectadoras Teon y Teon + han sido diseñadas, certificadas y validadas según las directivas y normas más estrictas:

Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios	EN 61010-2-040 Requisitos de seguridad	DIN EN ISO 15883-1/2 Termodesinfectadoras
EN 61326-1 Compatibilidad electromagnética	-	EN 1717 Protección contra la contaminación del agua potable

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), **Italy**
t +39 035-66 63 000
f +39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com

Wehadent Iberica S.L Unipersonal
C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, **España**
t +34 96 353 20 20
oficinas.es@wh.com
wh.com

Fotografías orientativas. Los accesorios y complementos adicionales mostrados no se incluyen en el contenido suministrado.

20492 ASP Rev. 003 / 21 .12.2022
Salvo modificaciones