

#whsterilization



video.wh.com

Plus d'info

sur

wh.com



Fabuleux **dedans & dehors**

Les stérilisateurs Lara
Parés pour l'avenir

lara

**Le plus rapide
des cycles B**
dans son segment

**Enregistrement
automatique des cycles**
sur clé USB
grande capacité


**Imprimante d'étiquettes
et de rapports**
de cycles de qualité
en option

**Extensions
uniques**

Design
**ergonomique
et fonctionnel**

Écran tactile en couleur
**pour une navigation
simple**

Dimensions idéales
pour une
intégration et une
utilisation aisées

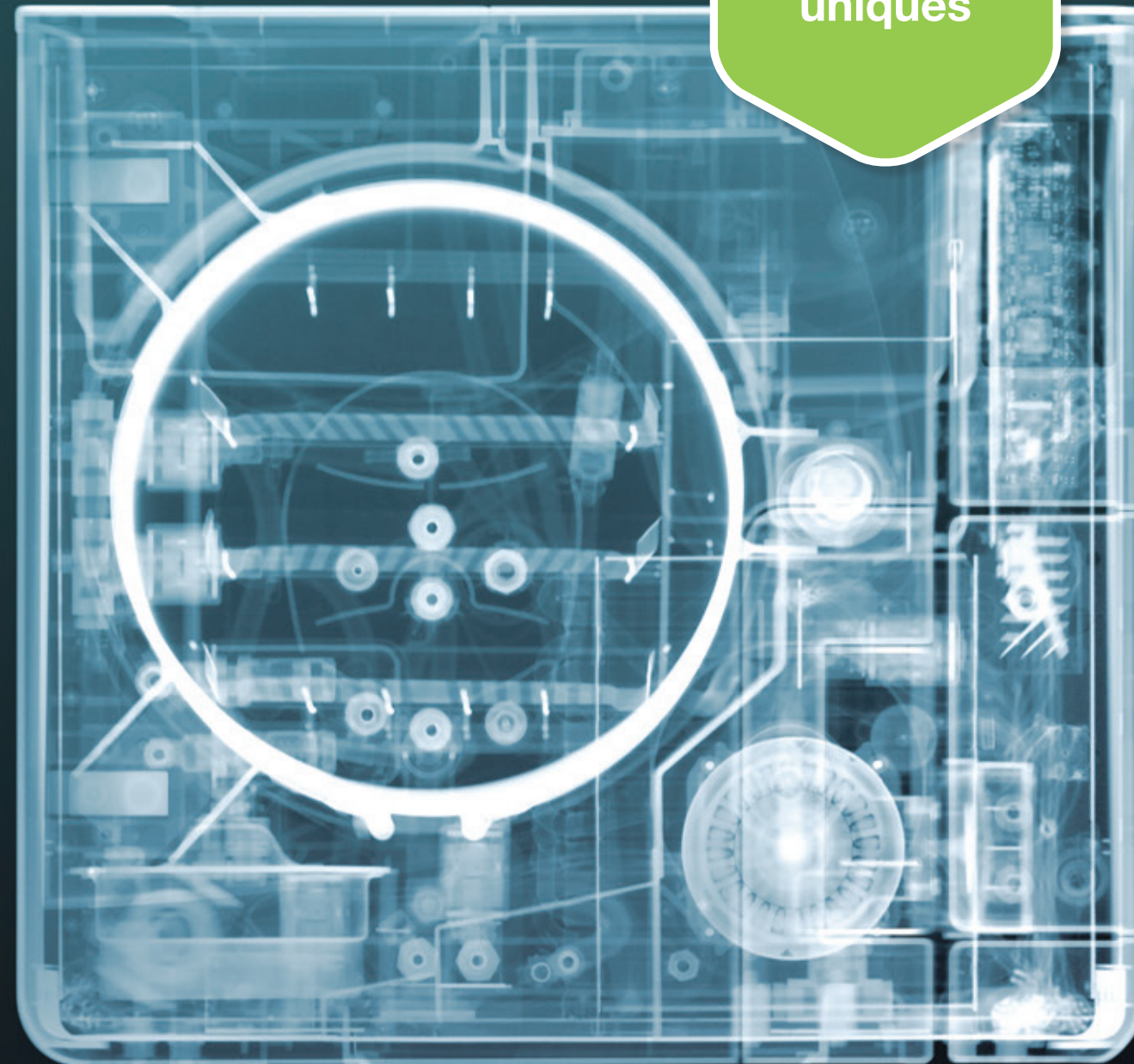

Cliché de Nick Veasey pour W&H.
Découvrez les incroyables œuvres de l'artiste
sur nickveasey.com

Découvrez une manipulation facile et une traçabilité sûre

L'écran tactile couleur du Lara a été spécialement conçu pour rendre vos tâches quotidiennes plus simples, plus rapides et plus efficaces. Lara propose également une solution complète de traçabilité, créée sur mesure pour répondre à vos attentes.

Utilisation simplifiée

La structure de menu intelligente des stérilisateurs Lara garantit un confort de manipulation exceptionnel : grâce au grand écran tactile en couleur, naviguez rapidement et intuitivement vers les programmes prédéfinis.

Clé USB grande capacité

Une clé USB grande capacité enregistre automatiquement les rapports des cycles pendant toute la durée de vie du Lara. En option : l'imprimante d'étiquettes et de rapports de cycles Lara, qui vous permet de documenter la traçabilité sans ordinateur ni logiciel supplémentaire.



Remplissage aisé

Un grand entonnoir intégré empêche les projections d'eau lors du remplissage.



Accès rapide au réservoir

Le couvercle du réservoir se retire facilement et sans outil pour le nettoyage.



Confort maximal

Un raccord automatique d'arrivée d'eau permet de brancher un système de déminéralisation de l'eau. Le remplissage et la vidange manuels ne sont plus nécessaires.

lara

Découvrez les avantages des extensions

Quoi que l'avenir nous réserve, vous y serez parfaitement préparé avec les stérilisateurs Lara. En effet, le nouveau système de codes d'activation de W&H vous garantit une amélioration économique, rapide et personnalisée de votre stérilisateur, pour s'adapter aux exigences de votre cabinet ou aux futures réglementations.

Aperçu des quatre fonctions supplémentaires :



Codes d'activation pour Lara

f @ h



Performance

Des durées de cycles encore plus rapides avec le passage à Eco Dry +, qui adapte automatiquement le temps de séchage au volume de la charge, ce qui économise du temps et de l'énergie.



Cycle rapide

Un cycle rapide entre deux cycles longs : cette fonction permet de stériliser des instruments non emballés, semi-critiques, en seulement 20 minutes.



Traçabilité

La fonction « Traçabilité » permet de personnaliser le stérilisateur et donc de remonter jusqu'à la personne qui a démarré le cycle de stérilisation. Cette personne s'identifie à l'aide d'un code PIN à 6 caractères.



Tout en un

Avec le code d'activation « Tout en un », vous bénéficiez de tous les avantages à la fois et votre stérilisateur atteint au final un rapport qualité/prix exceptionnel.



Un stérilisateur personnalisé en six étapes :

Étape 1

Procurez-vous le code d'activation qu'il vous faut auprès de W&H.

Étape 2

Une fois que vous avez reçu le code de connexion, rendez-vous sur **activation.wh.com**

Étape 3

Entrez ce code avec le numéro de série et le type de votre stérilisateur.

Étape 4

Votre code d'activation personnel est généré.

Étape 5

Entrez ce code dans le menu de votre stérilisateur Lara.

Étape 6

La fonction est déverrouillée.



Découvrez une efficacité exceptionnelle

Dès leur version standard, les stériliseurs Lara vous garantissent déjà l'un des cycles B les plus rapides de cette classe. Et vous pouvez encore les améliorer en activant les fonctions Eco Dry + et le cycle rapide.

Eco Dry + adapte automatiquement la durée du séchage à la charge, économisant ainsi du temps et de l'énergie. Également disponible avec un code d'activation : un cycle rapide de type S pour produits non emballés, semi-critiques.



Rapidité
Durée du cycle de type B avec séchage parfait : en moins de 30 MINUTES POUR UNE CHARGE DE 2 KG !

Durée de vie prolongée
L'adaptation automatique de la durée du séchage en fonction de la charge réduit le temps d'exposition à la chaleur, ce qui prolonge la durée de vie de vos instruments.

Économie d'énergie
L'optimisation de la durée du séchage s'accompagne d'une réduction de la consommation d'énergie. Le Lara est donc une « solution économique ».



Préparation en moins de 23 minutes !

Entretien : 10 secondes
L'Assistina Twin se charge de l'entretien en un temps record de 10 secondes.

Désinfection avec des lingettes : 1 minute
Désinfectez vos instruments avec des lingettes avant le nettoyage et l'entretien.

Stérilisation : 20 minutes
Grâce au cycle rapide de Lara, vous pouvez retirer vos instruments prêts à être utilisés après seulement 20 minutes.



Caractéristiques techniques



Cycle de stérilisation :		B-Universal 134		B-Prion 134		B-Universal 121	Cycle rapide En option
Température :		134 °C		134 °C		121 °C	134 °C
Palier (minutes) :		4'		18,5'		20,5'	3,5'
Durée totale du cycle (minutes), séchage intégral compris :	Lara 17	Automatique de 25' à 51'	37'	Automatique de 40' à 65'	52'	41' à 73'	20' à 22'
	Lara 22	Automatique de 28' à 55'	39'	Automatique de 40' à 68'	54'	42' à 76'	20' à 22'
Charge Lara 17 :		volume maxi 4,5 kg/standard 2 kg/poreuse maxi 1,5 kg					non emballée maxi 2 kg
Charge Lara 22 :		volume maxi 5,5 kg/standard 2 kg/poreuse maxi 2 kg					non emballée maxi 2 kg
Charge conteneurs Lara 17/22 :		maxi 9 kg					
Cycles de test :		Helix/Bowie Dick/test de vide					
Description du contenu : support plateaux pivotant, 3 plateaux en aluminium, tuyau de vidange, support pour plateaux, clé USB 8 Go, dispositif d'ouverture de porte, certificat d'usine							



Nom commercial : Modèles :	Lara RIL-117	Lara RIL-122
Volume du compartiment :	17 l	22 l
Alimentation électrique :	200-240 V CA ; 50/60 Hz ; 10 A	200-240 V CA ; 50/60 Hz ; 10 A
Consommation :	2,0-2,4 kW	
Dimensions totales (l x h x p) :	465 x 452 x 646 mm	
Poids (vide) :	42,5 kg	44 kg
Réservoir d'eau principal/eau usée :	4,8/4,8 l	
Plage de travail :	7 à 15 cycles	
Espace utile dans le compartiment (l x h x p) :	195 x 195 x 312 mm	195 x 195 x 400 mm
Types de connexion :	2 connexions USB, connexion intégrée pour le remplissage automatique de l'eau	

(1) L'espace utile se réfère à la configuration standard du support plateaux.


Les stériliseurs Lara ont été développés, certifiés et validés conformément aux directives et aux normes les plus strictes :		
2017/745 Règlement relatif aux dispositifs médicaux	IEC 61326-1 Compatibilité électromagnétique	IEC 61770 Appareils électriques pour le raccordement à l'installation d'alimentation en eau
2012/19/EU Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques	IEC 61010-1 Exigences générales de sécurité	EN 13060 Petit stérilisateur à vapeur d'eau
2014/68/EU Directive relative aux équipements sous pression	IEC 61010-2-040 Exigences particulières pour les stériliseurs à la vapeur d'eau	Le stérilisateur peut être validé conformément à la norme EN ISO 17665-1

W&H AIMS

La sécurité est notre priorité !

L'hygiène est d'une importance capitale au sein de votre cabinet dentaire. Vous pouvez compter sur W&H AIMS et sa gamme de produits très diversifiée, ses connaissances fondamentales et toutes les informations pertinentes disponibles en un clin d'oeil.

Pour votre sécurité et celle de vos patients. **aims.wh.com**

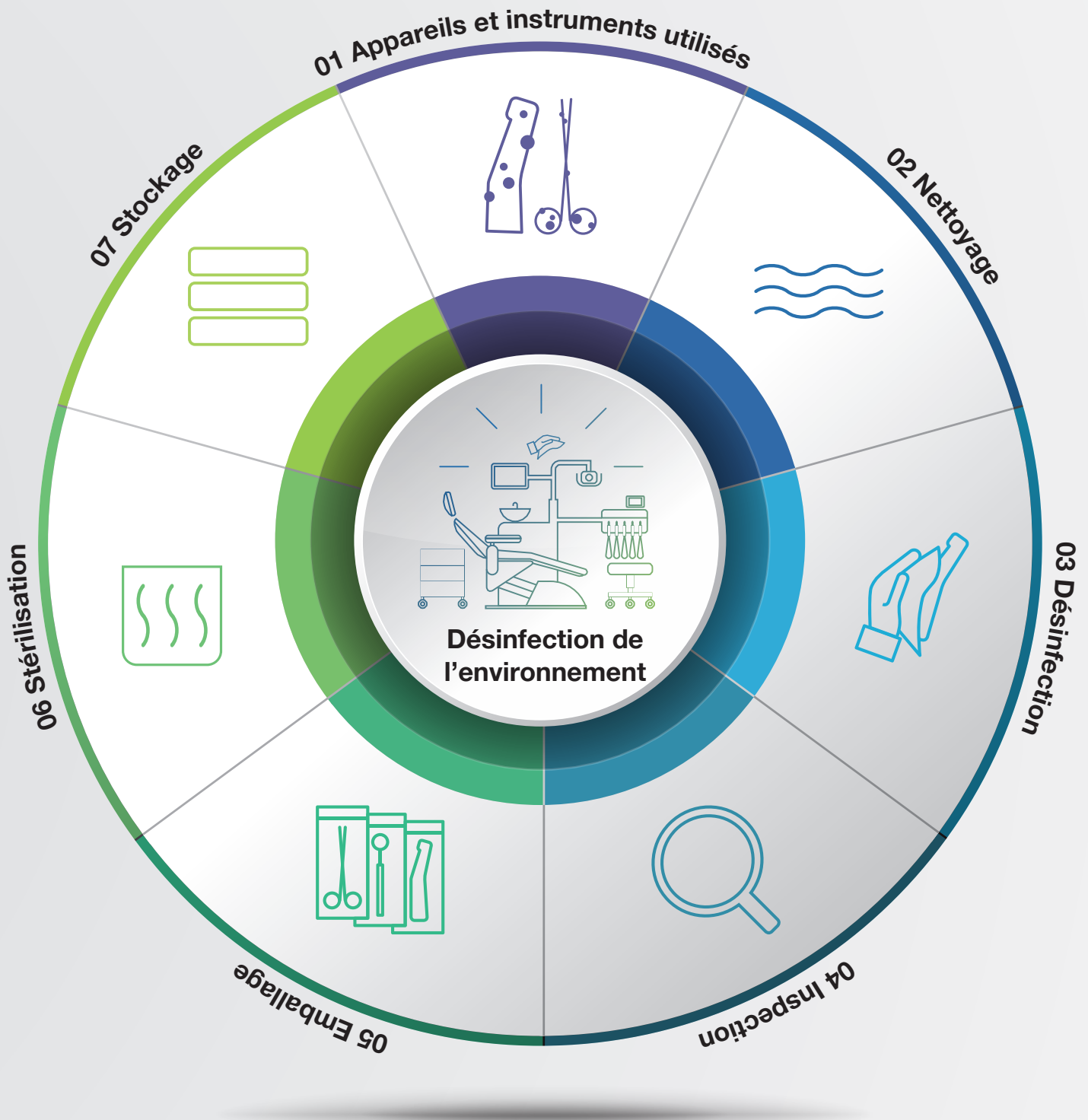

Décontamination

Nettoyage

Désinfection

Inspection et entretien/ maintenance

Emballage

Stérilisation

Traçabilité et stockage

Vos exigences, nos priorités

W&H est connu depuis longtemps pour son rôle de pionnier dans le domaine de la stérilisation. Notre objectif majeur consiste à développer des stérilisateurs innovants, fiables et rapides, qui s'intègrent parfaitement à chaque environnement de travail. Avec notre gamme de produits, nous sommes capables d'offrir le stérilisateur adapté à chaque exigence.

Pour en savoir plus sur notre gamme de stérilisateurs, consultez le site **wh.com**



Photos non contractuelles. Le matériel supplémentaire et les accessoires illustrés ne font pas partie de la livraison standard.

Fabricant :

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), **Italy**
t +39 035-66 63 000
f +39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com

Distribution :

W&H France
4 rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim, **France**
t. +33 388 773600
commercial.fr@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com

Information réglementaire :

Dispositifs Médicaux Classe 2b / CE 0051 / IMQ. Réservés aux professionnels de la médecine dentaire, non remboursés par les organismes d'assurance maladie. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation ou sur l'étiquetage des produits.

20494 AFR Rev. 003 / 17.07.2023
Sous réserve de modifications