

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei Ihrem
Fachhändler oder
auf wh.com



Piezomed Hygieneleitfaden

Gereinigt, gepflegt, sterilisiert.

Ein Leitfaden für den Weg Ihrer Handstücke,
Instrumente und Ihres Steuergeräts durch
den Wiederaufbereitungskreislauf.



piezomed

1 ERSTBEHANDLUNG AM GEBRAUCHSORT



1.1 Handschuhe

1.2 Instrument abnehmen

Nehmen Sie das Instrument vom Handstück ab und legen Sie es in Desinfektionsmittel ein.

1.3 Piezomed Handstück abnehmen

Nehmen Sie das Piezomed Handstück mit Kabel ab

1.4 Vordesinfektion

Wischen Sie das Piezomed Handstück mit Kabel, die Motorlage und das Stativ mit Desinfektionsmittel ab.

1.5 Zerlegen

Schrauben Sie die Außenhülse vom Piezomed Handstück ab und entfernen Sie den LED Sockel.

2 AUFBEREITUNG

Reinigung und Desinfektion

MASCHINELL

Reinigung und Desinfektion



Einlegen des Handstückes samt Zubehör in den Siebkorb



Anschließen des Kühlmittelrohrreinigerschlauhs an das Handstück



Aufschrauben der Piezomed Instrumente auf den Adapter des Thermodesinfektor

ODER

MANUELL

Reinigung



Piezomed Instrumente einzeln oder im Instrumentenclip in Ultraschallbad



Abbürsten und Abspülen des zerlegten Handstückes mit Kabel, Universalablage und Instrumentenwechsler



1. Durchspülen des Kühlmittelrohres mittels einer Spülnadel
2. Ab- und Durchspülen der Instrumente und des Instrumentenclips

Desinfektion



Einzelteile des Piezomed Handstückes unter Beachtung der Einwirkzeit des Desinfektionsmittels, desinfizieren

2.1



2.2



2.3



2.4



Trocknung
Trocknung der einzelnen Teile mittels Druckluft

Kontrolle, Pflege und Prüfung
Sichtprüfen Sie die einzelnen Teile auf Beschädigung oder Restverschmutzung

Zusammensetzen der Einzelteile
Setzen Sie das Handstück mit Kabel wieder zusammen

2.7



Lagerung

Lagern Sie die sterilisierten Produkte bei Raumtemperatur staubfrei, trocken, vor Kontamination- und Sonneneinstrahlung geschützt.


2.6



Sterilisation

Sterilisation in Klasse B Sterilisator

2.5

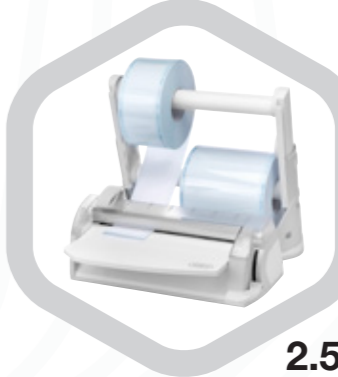

Verpackung

Verpacken der Sterilisationskassette oder Einzelteile in Sterilisationsfolie

