

#whdentalwerk  
f @ in ▶  
video.wh.com

Jetzt bei Ihrem  
Fachhändler oder  
auf **wh.com**



## Proxeo Aura

# Hinweise zur Vorbereitung der Behandlung

### a) HINWEISE VOR DER BEHANDLUNG

**1** Für die gewünschte Behandlung den passenden Sprayaufsatz auswählen

**2** Vor Anwendung Pulverflasche gut schütteln



**3** Beachten Sie die maximale Pulverfüllmenge

1. SOFT, SMOOTH > Prophy
2. SENSITIVE Glycine Pulver > Perio
3. Vermeiden Sie eine Überfüllung des Pulverbehälters

**4** Wählen Sie die richtige Einstellung mit Hilfe des Einstellrings

1. SOFT, SMOOTH > Prophy
2. SENSITIVE Glycine Pulver > Perio

**5** Neigen Sie das Proxeo Aura Pulverstrahlhandy während des Gebrauchs nicht mehr als 45° sowohl in Längsrichtung als auch in Querrichtung. Wenn Sie den Strahl an eine andere Stelle lenken müssen, können Sie den Sprayaufsatz um 360° drehen.

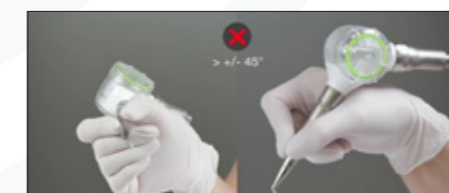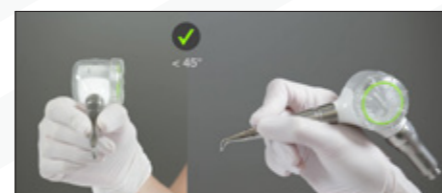

# Proxeo Aura

## Pflege- und Reinigungshinweise

### b) HINWEISE NACH DER BEHANDLUNG\*


1

Entfernen Sie gegebenenfalls die Paro Spitze




2

Wischdesinfizieren Sie den Sprayaufsatz, das Handstück, die Schnellkupplung etc.

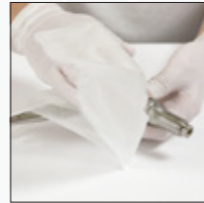

3

Öffnen Sie den Pulverbehälter

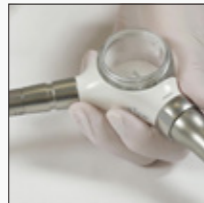


4

Entsorgen Sie das restliche Pulver gemäß den lokalen Regularien



5

Verwenden Sie eine Luftpistole, um Pulverbehälter und Deckel mit Druckluft zu reinigen

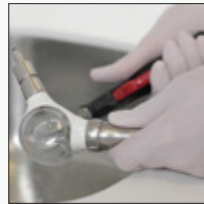


6

Verwenden Sie die Interdental-Bürste, um die Ein- und Auslässe in der Pulverkammer zu reinigen



7

Schließen Sie den Pulverbehälter

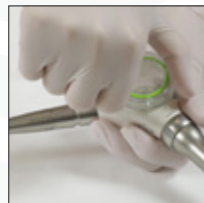

8

Spülen Sie das System 8 bis 10 Sekunden ohne Pulver (nur mit Luft und Wasser), halten Sie dabei den Pulverstrahl in die Absaugung

9

Nehmen Sie das Handy von der Schnellkupplung



10

Trocknen Sie die Schnellkupplung mit Druckluft



11

Entfernen Sie den Sprayaufsatz



12


Trocknen Sie die Ein- und Auslässe an der Vorder- und Rückseite des Sprayaufsatzes mit Druckluft



13

Bringen Sie den Sprayaufsatz zur hygienischen Aufbereitung

- Aufbereitung des Sprayaufsatzes im Thermodesinfektor
  - › Wenn möglich passenden Adapter nutzen
  - › Zubehör Teon/Teon+
    - Standard Adapter A803 (für Sprayaufsatz Standardlänge 120°, 90°, Perio)
    - Zusatzadapter A801 + AUF1 + ADS Silikon (weiß) (für Sprayaufsatz kurz 120°, 90°, Perio)
- Aufbereitung des Sprayaufsatzes im Steri

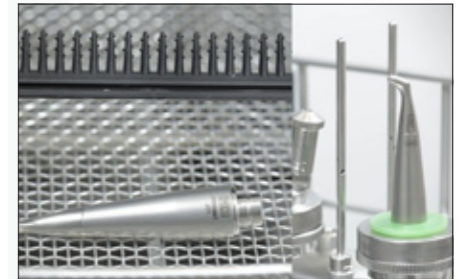

14

Trocknen Sie die Ein- und Auslässe auf der Vorder- und Rückseite des Handstücks mit Druckluft



15

Falls erforderlich, Pulverbehälter und Deckel erneut mit Druckluft reinigen

16

Falls erforderlich, verwenden Sie die Interdental-Bürste, um die Ein- und Auslässe in der Pulverkammer erneut zu reinigen



\* Hinweis: Detaillierte Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.