

#whsterilization



video.wh.com

Ora disponibile presso
il vostro rivenditore
o su **wh.com**



Thed
soddisfa
ogni
desiderio



thed

thed +

Esprimi un desiderio...

Più potenza, più velocità, più flessibilità... o tutte e tre?
I termodisinfettori Thed+ e Thed garantiscono una pulizia
e disinfezione potenti, una straordinaria flessibilità di carico,
tempi di ricondizionamento ridotti e molto altro ancora.
Thed soddisfa ogni desiderio.



Funzionalità di Thed:

- › Due livelli di lavaggio
- › Cicli rapidi con elevate prestazioni di pulizia
- › Asciugatura ad aria forzata con filtro HEPA
- › Connettività estesa
- › Posizionamento interno delle chimiche
- › Sistema a cartucce esclusivo (per i dispositivi da banco)
- › Design moderno
- › Ampia selezione di accessori
- › Interfaccia user-friendly

Funzionalità aggiuntive di Thed+:

- › EliSense: visualizzazione dello stato del dispositivo
- › Riconoscimento automatico del cesto
- › Riconoscimento automatico dell'iniettore corpi cavi
- › Raccomandazione automatica dei programmi
- › Adattamento automatico del tempo di ciclo e del consumo di acqua, corrente e chimiche
- › Camera di lavaggio con illuminazione interna

Maggiore flessibilità e versatilità

Tutti i modelli Thed si contraddistinguono per l'utilizzo flessibile e versatile della camera e per le loro dimensioni compatte. La versione da incasso può essere posizionata facilmente all'interno dello studio odontoiatrico mentre quella da banco su un qualsiasi piano di lavoro standard.

Due livelli di lavaggio

A seconda delle esigenze di carico, i modelli Thed dispongono di uno o due livelli di lavaggio. In questo modo è possibile sfruttare al meglio lo spazio della camera da 64 l e gestire in modo ottimale i carichi di lavoro variabili nel corso della settimana lavorativa. Ecco perché i termodisinfettori W&H sono unici nel loro genere.

Thed+: Riconoscimento automatico del cesto

Thed+ soddisfa qualsiasi desiderio: il dispositivo riconosce automaticamente l'uso di uno solo o di entrambi i livelli di lavaggio e adatta di conseguenza il tempo di ciclo, i consumi di acqua, di corrente e di chimiche.



Maggiore potenza e velocità

I termodisinfettori Thed di W&H sono altamente efficienti. Grazie ai loro programmi specifici, assicurano una straordinaria pulizia ed un'ottima disinfezione per lo studio odontoiatrico. Thed e Thed+ migliorano l'organizzazione del lavoro all'interno della sala di sterilizzazione, riducono i tempi di ricondizionamento e prevengono ulteriormente la contaminazione crociata.



Pulizia e disinfezione a elevata potenza

La pulizia e la disinfezione del carico non sono solo potenti, ma anche delicate e veloci. Gli strumenti vengono puliti, disinfettati e asciugati in meno di 60 minuti. In più i dispositivi Thed includono un'ampia scelta di programmi speciali, come quello per ricondizionare gli strumenti di trasmissione in soli 35 minuti. Inoltre, alcuni slot di programma sono completamente personalizzabili e possono essere configurati in base alle esigenze individuali.



Thed+: stato del dispositivo EliSense

Attraverso una luce LED posizionata sulla maniglia, Thed+ consente di capire al volo lo stato del dispositivo per ottimizzare sia il workflow che l'output.

Ciclo in corso

La luce verde si accende e lampeggia.

Ciclo terminato

La luce verde si accende e rimane statica.

Attenzione

Il dispositivo richiede attenzione, ad es. è necessaria un'aggiunta di sale o di detergente. La luce gialla si accende e rimane statica.

Ciclo interrotto

Compare nel caso in cui si arresti manualmente il ciclo o si verifichi un errore rilevante. La luce rossa si accende e rimane statica.



Asciugatura ad aria forzata con filtro HEPA

Grazie all'asciugatura ad aria forzata, questi termodisinfettori consentono di ottenere carichi perfettamente asciutti e protetti da ricontaminazione, corrosione e altri danni. In questo modo, Thed e Thed+ garantiscono il miglior workflow igienico possibile, senza passaggi supplementari o costi aggiuntivi.



Thed+: completamente automatico

Il dispositivo offre la massima comodità grazie alla raccomandazione automatica dei programmi e alla funzione Eco Dry. I sensori incorporati consentono di selezionare il programma più idoneo; inoltre, la durata del ciclo, i consumi di acqua, di corrente e di chimiche vengono adattati automaticamente in base alla configurazione del carico. Grazie alla funzione Eco Dry, Thed+ riconosce la quantità di carico e può quindi regolare di conseguenza il tempo di asciugatura.



Maggiore comodità e connettività

Anche il ricondizionamento può essere un processo comodo ed efficiente. È il know-how tecnologico a fare la differenza. I termodisinfettori Thed si basano su una tecnologia sofisticata, con funzionalità orientate al futuro e che semplificano notevolmente il tuo workflow quotidiano.



Navigazione intuitiva

Il menu user-friendly garantisce una semplicità di utilizzo straordinaria: attraverso il grande display touch a colori da 4,3" puoi navigare in modo rapido ed intuitivo all'interno delle diverse funzioni.

Superficie liscia e design moderno

I termodisinfettori si distinguono per prestazioni di elevata qualità che garantiscono un processo di pulizia completo ed efficace per gli strumenti dentali. Grazie al design moderno ed elegante, sono in grado di integrarsi perfettamente in qualsiasi sala di sterilizzazione.



Tracciabilità e connettività avanzate

- › La documentazione viene salvata automaticamente su una chiavetta USB.
- › Le connessioni WLAN e LAN permettono di scaricare i report di ciclo direttamente su un PC o uno Smart Device.
- › Il sistema ioDent® offre soluzioni intelligenti e fornisce un servizio di assistenza e supporto di alta qualità.
- › W&H Steri App consente il controllo e il monitoraggio da remoto dei dispositivi Thed. È inoltre possibile salvare i backup dell'andamento del ciclo automaticamente sullo smartphone per una maggiore sicurezza.



bepro

Scansiona il codice QR per scoprire la nostra gamma di detergenti e disinfettanti.



Sostanze chimiche integrate

Nella versione da incasso, le chimiche sono riposte all'interno di un cassetto, mentre nel dispositivo da banco si trovano dietro un pannello rimovibile. Ciò consente, in entrambi i casi, di risparmiare spazio garantendo al contempo un facile accesso. L'esplicita etichettatura sui detergenti e disinfettanti aiuta anche ad evitare possibili errori.

Sistema a cartucce

Il dispositivo da banco offre una comodità ancora maggiore, poiché l'esclusivo sistema a cartucce di W&H rende ancora più semplice la sostituzione delle chimiche. La forma differente delle varie cartucce consente di evitare errori durante l'inserimento. Infine, la posizione inclinata delle cartucce negli appositi spazi garantisce un utilizzo ottimale e senza sprechi.

Ulteriori accessori

Il ricondizionamento può essere semplice ed efficace se si dispone degli accessori ideali per il proprio dispositivo. Thed viene venduto vuoto Personalizza il dispositivo con gli accessori che preferisci.

Starter Kit

Comprende un assortimento di base ottimale.

- 1** Cesto inferiore
- 3** Cestello (1/4)
- 4** Cestello (1/2)
- 5** Supporto per strumenti verticale (1/4)
- 10** Supporto per 3 vassoi o cassette

Kit Iniezione

Particolarmente indicato per il ricondizionamento di strumenti di trasmissione e corpi cavi.

- 1** Cesto inferiore
- 3** Cestello (1/4)
- 4** Cestello (1/2)
- 5** Supporto per strumenti verticale (1/4)
- 8** Iniettore corpi cavi
- 9** Kit di adattatori per strumenti di trasmissione (3 pcs.)
- 13** Tappo per iniettore corpi cavi (14 pcs.)

Pro Kit

Per tutti coloro che desiderano trarre vantaggio dalla flessibilità dei due livelli di lavaggio.

- 1** Cesto inferiore
- 2** Cesto superiore
- 3** Cestello (1/4) (2 pcs.)
- 4** Cestello (1/2) (2 pcs.)
- 5** Supporto per strumenti verticale (1/4)
- 7** Supporto per pinze, forbici e porta impronte
- 11** Supporto per 5 vassoi o cassette



Cesto inferiore



Cesto superiore



Cestello (1/4)



Cestello (1/2)



Supporto per strumenti verticale (1/4)



Supporto per strumenti verticale (1/2)



Supporto per pinze, forbici e porta impronte



Iniettore corpi cavi



Kit di adattatori per strumenti di trasmissione



Supporto per 3 vassoi o cassette



Supporto per 5 vassoi o cassette



Ugello cannula



Tappo per iniettore corpi cavi



Adattatore a 3 vie



Adattatore per canale spray esterno



Coperchio per cestello (1/4)



Adattatore per inserti (standard)



Adattatore per inserti (US)

Dati tecnici

Denominazione sociale:	Thed (Plus-Edition) ⁽¹⁾	Thed (Plus-Edition) ⁽¹⁾	Thed	Thed
Versione:	Versione da incasso	Versione da banco	Versione da incasso	Versione da banco
Alimentazione elettrica:	3N 380 – 415 V; 220 – 240 V		220 – 240 V	
Frequenza:	50 – 60 Hz		50 Hz	
Corrente:	13-16-32 A		16 A	
Dimensioni complessive (LxAxP):	598 x 815 x 628 mm	598 x 599 x 628 mm	598 x 815 x 628 mm	598 x 599 x 628 mm
Spazio necessario per l'installazione (LxAxP):	600 x 818 x 630 mm	600 x 603 x 630 mm	600 x 818 x 630 mm	600 x 603 x 630 mm
Peso (vuoto):	72 kg	54 kg	72 kg	54 kg
Peso (pieno carico):	104 kg	76 kg	104 kg	76 kg
Volume della camera:	64 l	64 l	64 l	64 l
Asciugatura forzata:	●	●	●	●
Filtro HEPA:	●	●	●	●
Raccordo acqua fredda:	●	●	●	●
Raccordo per acqua demineralizzata:	●	●	●	●
Raccordo acqua calda:	○	○	○	○
Numero di pompe peristaltiche:	3	2	3	2
Numero di programmi:	4	4	4	4
Numero di programmi personalizzabili:	4	4	4	4
Durata del ciclo asciugatura inclusa ⁽²⁾ :	Standard ⁽³⁾ 55' Intenso ⁽³⁾ 80' Rapido ⁽³⁾ 43' Strumenti di trasmissione ⁽³⁾ 35'		Standard ⁽⁴⁾ 84' Intenso ⁽⁴⁾ 110' Rapido ⁽⁴⁾ 68' Strumenti di trasmissione ⁽⁴⁾ 55'	

● Standard ○ Opzionale

⁽¹⁾ Plus Edition si riferisce al dispositivo con tutti gli accessori

⁽²⁾ La durata totale di un ciclo può variare a seconda del tipo e del peso del carico, della durata della fase di asciugatura, della pressione e della temperatura dell'alimentazione d'acqua, delle fluttuazioni di tensione nella rete elettrica e di altri fattori.

⁽³⁾ Versione trifase, ⁽⁴⁾ Versione monofase a 230 V

Thed e Thed+ sono stati sviluppati, certificati e convalidati secondo le più severe norme e direttive:

2017/745 Disposizione sui dispositivi medici	IEC 61010-2-040 Prescrizioni specifiche per sterilizzatrici a vapore	ISO 15883-1 Apparecchi di lavaggio e disinfezione
2012/19/UE Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	IEC 61326-1 Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica	ISO 15883-2 Apparecchi di lavaggio e disinfezione
IEC 61010-1 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio	IEC 61770 Dispositivi elettrici per il collegamento al sistema idrico	ISO 15883-5 Apparecchi di lavaggio e disinfezione

Produttore:

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), **Italy**
t +39 035-66 63 000
f +39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com

Distribuzione:

W&H Italia S.r.l.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), **Italy**
t +39 035 6663911
f +39 035 0662504
office.it@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com