

Schon heute bereit für morgen: **Lara**



So einzigartig wie Ihre Praxis

Die Lara-Sterilisatoren bieten den schnellsten Sterilisationszyklus ihrer Klasse – plus Standarddokumentation. Das zusätzliche, neu entwickelte Upgrade-System bietet als optionales Feature eine erweiterte Dokumentation – und stellt damit sicher, dass Sie auch bei veränderten Anforderungen optimal ausgestattet sind.

Schnellster Zyklus
ihres Segments

Ergonomisches und funktionelles Design

Automatische Zyklusaufzeichnung
dank leistungsstarkem USB-Stick

Farb-Touchscreen-Display
zur einfachen Steuerung

High-end-Etiketten- und
Zyklusreport-Drucker
optional

Ideale Maße
für leichte Integration
und Bedienung



Schnellster B-Zyklus
in seinem Segment zur
Wiederaufbereitung aller Arten
von Sterilisationsgütern

Erweiterte Konnektivität
mit Wi-Fi-Verbindung
und Mobile App

Automatische Wasserbefüllung
spart Zeit und sorgt für höchste
Ergonomie

Eingebauter USB-Datenspeicher
zur digitalen Zyklusdokumentation
und rechtlichen Absicherung

Schnellzyklus
für eine schnelle Sterilisation
von unverpackten Instrumenten
in 20 Minuten

Einfache Bedienung
dank intuitiver Bedienoberfläche
und benutzerfreundlicher
Menüführung

Glattes Oberflächendesign
für einfache Reinigung

Barcode-Etikettendrucker (optional)
für die Erweiterung des
Dokumentationssystems
durch Verlinkung von
„Beladung – Zyklus – Patient“



Entdecken Sie herausragende **Effizienz**

Die Lara-Sterilisatoren bieten Ihnen bereits in der Standard-Version einen der schnellsten Zyklen dieser Klasse. Und diesen können Sie durch Aktivieren der zusätzlichen Funktion für höhere Leistung noch verbessern.

eco dry+

Eco Dry + passt die Trocknungszeit automatisch an die Beladung an – und spart so Zeit und Energie.

Zeitersparnis

Typ B-Zyklusdauer von WENIGER ALS 40 MINUTEN BEI 2 KG BELADUNG inklusive perfekter Trocknung!

Verlängerte Lebensdauer

Dank der beladungsabhängigen automatischen Anpassung der Trocknungszeit verringert sich die Dauer der Hitzeeinwirkung. Das verlängert die Lebensdauer Ihrer Instrumente.

Energieeinsparung

Die Optimierung der Trocknungszeit bedeutet einen geringeren Energieverbrauch. Das macht die Lara zu einer „ökonomischen Lösung“.

Benutzeridentifikation

Holen Sie sich mittels Activation Code zusätzliche Funktionen wie zum Beispiel die Benutzeridentifikation: Der Benutzer, der den Sterilisator be- und entladen hat, kann digital aufgezeichnet werden. Die Benutzer identifizieren sich durch eine 6-stellige PIN.

Freigabebestätigung der Ladung

Ebenfalls als Upgrade erhältlich: die Freigabebestätigung. Mit dieser Option werden der Name des Anwenders und dessen Bestätigung der erfolgreichen Sterilisation und/oder des erfolgreichen Testzyklus digital erfasst.



Entdecken Sie einfache Bedienbarkeit und sichere Rückverfolgbarkeit

Der Lara Farb-Touchscreen wurde speziell entwickelt, um Ihren täglichen Arbeitsablauf leichter, schneller und effizienter zu gestalten. Darüber hinaus bietet Lara ein umfassendes Dokumentationskonzept – maßgeschneidert für Ihre Ansprüche.



Einfach zu bedienen

Die intelligente Menüstruktur der Lara-Sterilisatoren sorgt für einen außergewöhnlich hohen Bedienkomfort: Navigieren Sie dank großem Farb-Touchscreen schnell und intuitiv zu den voreingestellten Programmen.



Leistungsstarker USB-Stick

Ein leistungsstarker USB-Stick speichert automatisch die Zyklusberichte während der gesamten Lebensdauer von Lara. Optional erhältlich: der Lara Etiketten- und Zyklusreport-Drucker, mit dem Sie die Rückverfolgbarkeit ohne zusätzlichen Computer oder separate Software dokumentieren können.



Einfaches Befüllen

Ein integrierter Trichter mit großem Fassungsvermögen verhindert Wasserspritzer während des Füllvorgangs.



Müheloser Zugang zum Tank

Der Tankdeckel kann zum Reinigen des Tanks leicht und ohne Werkzeug entfernt werden.



Automatische Wasserbefüllung

Ein automatisches Wasserfüllventil ermöglicht das Anschließen eines Wasser-Aufbereitungssystems. Manuelles Befüllen und Entleeren ist nicht mehr erforderlich.



Einfach und praktisch

Wählen Sie, wie viele Etiketten EliSafe ausdrucken soll: automatisch oder manuell.



Entdecken Sie den **Vorteil von Upgrades**

Was auch immer in Zukunft in regulatorischer Hinsicht passiert: Mit den Lara-Sterilisatoren sind Sie bestens darauf vorbereitet. Tatsächlich ermöglicht Ihnen das Activation Code-System ein preiswertes, schnelles und individuelles Upgrade Ihres Sterilisators je nach Praxis-Anforderungen oder zukünftigen regulatorischen Auflagen.



Die **zwei zusätzlichen Funktionen** auf einen Blick:





Performance

Noch schnellere Zykluszeiten durch ein Upgrade der „Performance“-Funktion auf Eco Dry +, mit dem sich die Trocknungszeit automatisch an das Gewicht der Ladung anpasst. Das spart Zeit und Energie.



Traceability

Die „Traceability“-Funktion ermöglicht die Personalisierung des Sterilisators und damit die Rückverfolgbarkeit hin bis zu der Person, die den Sterilisationszyklus gestartet und bestätigt hat, da sich jede Person durch einen 6-stelligen PIN-Code direkt am Gerät identifiziert.

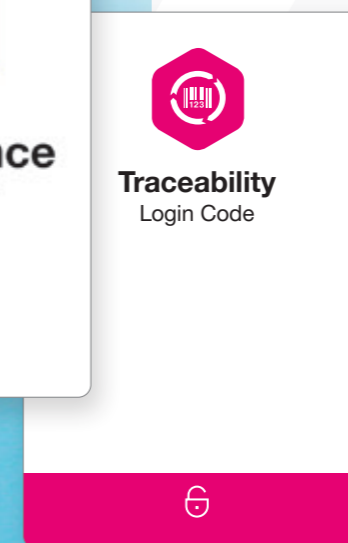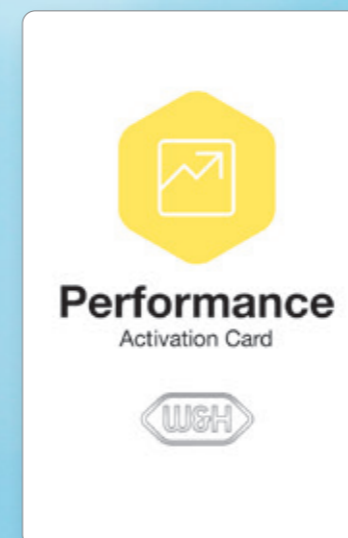

In sechs Schritten zum individuellen Sterilisator:

Schritt 1

Kaufen Sie den für Sie relevanten Activation Code bei Ihrem lokalen Fachhändler für Medizinprodukte.

Schritt 2

Nach Erhalt des Login Codes gehen Sie zu **activation.wh.com**.

Schritt 3

Sie geben diesen Zugangscode gemeinsam mit der Serien-Nummer und Ihrer Sterilisator-Type bekannt.

Schritt 4

Ihr individueller Activation Code wird generiert.

Schritt 5

Geben Sie diesen Code im Menü Ihres Lara-Sterilisators ein.

Schritt 6

Die Funktion ist freigeschaltet.

Technische Daten

Sterilisationszyklus:	B-Universal 134		B-Prion 134		B-Universal 121	Schnellzyklus
Temperatur:	134°C		134°C		121°C	134°C
Haltezeit (Minuten):	5' 30"		20' 30"		20' 30"	3' 30"
Gesamtzyklusdauer (Minuten) einschließlich vollständiger Trocknung:	Automatisch von	Normale Beladung	Automatisch von	Normale Beladung	Automatisch von	Volle Beladung
	28'–55'	39'	40'–68'	54'	42'–76'	20'–22'
Max. Beladung:	max.massiv 5,5 kg/normal 2 kg/max. porös 2 kg					unverpackt max. 2 kg
Max. Behälterbeladung:	max. 9 kg					Nicht zutreffend
Testzyklen:	Helix/Bowie und Dick/Vakuum					
Geräteelieferung mit drehbarem Trayträger, 3 Aluminiumtrays, Ablassschlauch, Trayhalter, 8-GB-USB-Stick, Türöffner, Werkstest						



Handelsname:	Lara
Type:	RIL-22
Kammergröße:	22 l
Stromversorgung:	200–240 V AC; 50/60 Hz; 10 A
Leistungsaufnahme:	2.0–2.4 kW
Gesamtabmessungen (B x H x T):	465 x 452 x 646 mm
Gewicht (leer):	44 kg
Frisch-/Gebrauchwassertank:	4,8/4,8 l
Betriebsbereich:	7 bis 15 Zyklen
Nutzfläche (B x H x T):	195 x 195 x 400 mm (1)
Anschlussmöglichkeiten:	2 USB-Anschlüsse (5 optional), integriertes automatisches Wasserfüllventil

(1) Nutzfläche bezogen auf Standard-Trayträger.

Die Lara-Sterilisatoren wurden nach den strengsten Richtlinien und Normen entwickelt, zertifiziert und validiert:		
2017/745 Medizinprodukteverordnung	IEC 61326-1 Elektromagnetische Verträglichkeit	IEC 61770 Elektrische Geräte zum Anschluss an die Wasserversorgungsanlage
2012/19/EU Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte	IEC 61010-1 Sicherheitstechnische Anforderungen	EN 13060 Kleiner Dampfsterilisator
2014/68/EU Druckgeräterichtlinie	IEC 61010-2-040 Besondere Anforderungen für Dampfsterilisatoren	Der Sterilisator kann gemäß EN ISO 17665-1 validiert werden

Hersteller:

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), **Italy**
t +39 035-66 63 000
f +39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
med.wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
Ludwigstraße 27
83435 Bad Reichenhall, **Deutschland**
t +49 8651 904 244-0
f +49 8651 904 244-4
office.de@wh.com
med.wh.com

W&H Austria GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53
5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-239
f +43 6274 6236-890
office.at@wh.com
med.wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
med.wh.com

Abb. Symbolfotos. Zusatzausstattung und Inhalt der gezeigten Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

20510 ADT Rev. 003 / 17.07.2023
Änderungen vorbehalten