

# Bonnes pratiques – Hygiène et entretien optimisés



Traitement des pièces à main/contre-angles et des moteurs **W&H Med**

## Consignes de traitement

Ces recommandations d'hygiène et d'entretien s'appliquent tout particulièrement aux porte-instruments dynamiques et moteurs W&H Med.

### Consignes générales

- Nettoyez et désinfectez la pièce à main/le contre-angle immédiatement après chaque traitement.
- Pour les porte-instruments dynamiques et moteurs de chirurgie W&H Med, utilisez des désinfectants testés et certifiés et respectez le dosage et le temps d'action préconisés. Le désinfectant utilisé ne doit pas contenir de chlore.
- Respectez les données détaillées dans la notice d'utilisation du fabricant.

Les porte-instruments dynamiques et moteurs portant ce symbole peuvent être stérilisés.

Les porte-instruments dynamiques et moteurs portant ce symbole peuvent être nettoyés et désinfectés par thermodésinfection dans le laveur désinfecteur.

- Le port de vêtements de protection (gants indéchirables, lunettes, éventuellement masque) est conseillé.
- Utilisez de l'air d'entraînement propre et sec.
- W&H recommande l'utilisation d'eau déminéralisée.
- Observez les informations complètes disponibles sur **med.wh.com**


1

## Situation initiale



2

## Préparation

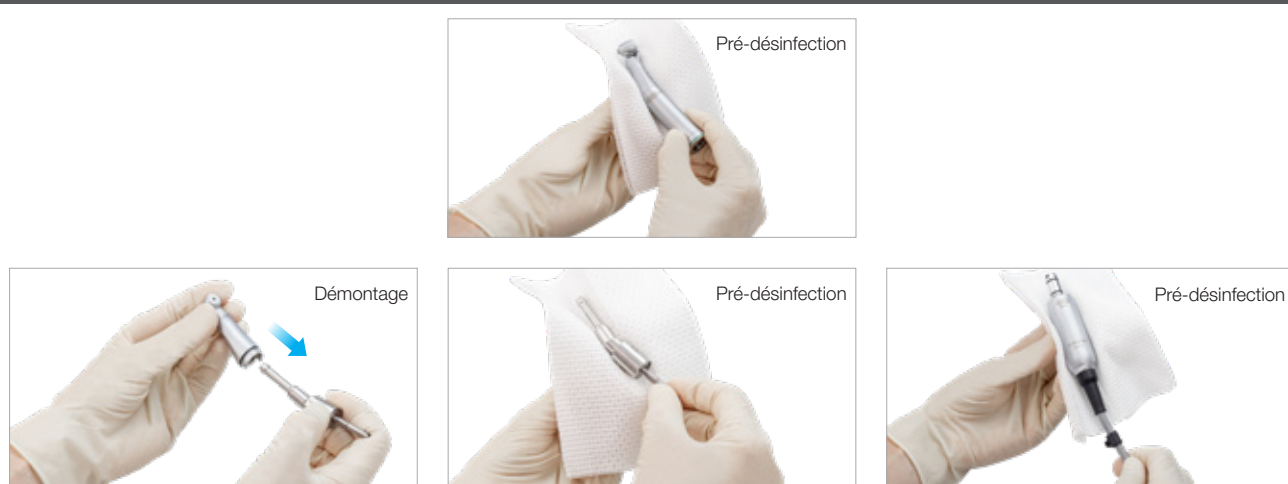

3

## Nettoyage/Séchage

### Manuel



Enlevez les résidus de liquide restants à l'air comprimé

### Automatique



Respectez les consignes du fabricant du laveur désinfecteur !

4

## Désinfection/Séchage



Assemblage




Respectez les consignes du fabricant du laveur désinfecteur !

Les porte-instruments dynamiques peuvent être nettoyés et désinfectés à l'état assemblé ou désassemblé dans le laveur désinfecteur ; les instruments assemblés doivent être placés sur un adaptateur correspondant.

5

## Inspection et lubrification

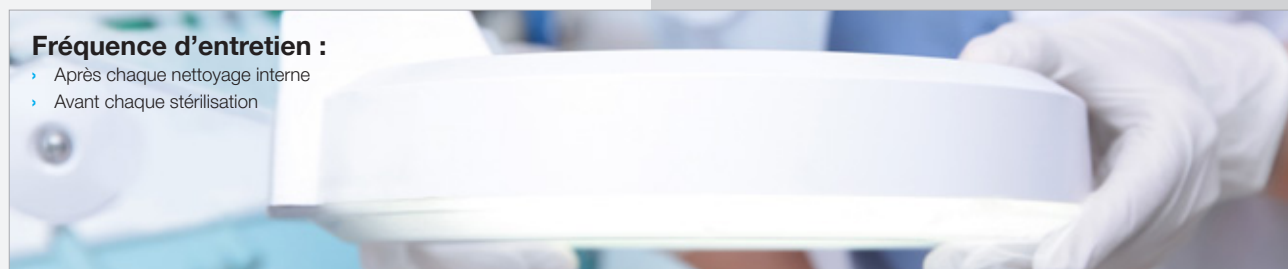

### Fréquence d'entretien :

- Après chaque nettoyage interne
- Avant chaque stérilisation

### Manuel



### Mécanique



6

## Emballage/Stérilisation

### Emballage

- Un système d'emballage doit être constitué d'une barrière stérile et d'un emballage de protection.
- Utilisez exclusivement des systèmes et méthodes d'emballage conformes aux normes en vigueur en matière de qualité et d'utilisation et adaptés à la méthode de stérilisation choisie.
- Les sachets de stérilisation doivent être suffisamment grands pour le produit à stériliser et ne doivent pas être sous tension.
- Le sachet et tout autre matériau d'emballage ne doivent pas être réutilisés.



### Stérilisation

La stérilisation permet d'éliminer tous les micro-organismes vivants, y compris les spores. Le niveau d'assurance de la stérilité (valeur NAS/SAL) pour un produit stérilisé se situe entre un et un million (NAS/SAL 10-6).

- Type B** : stérilisation médicale = convient à tout type de charges
- Type N** : uniquement pour des instruments solides non emballés
- Type S** : pour des produits spécifiques selon les indications du fabricant

Observez les instructions détaillées de la notice d'utilisation fournie par le fabricant. Respectez la législation, les directives, les normes et les prescriptions nationales.



8

## Stockage

Stockez le produit stérile à l'abri de la poussière et de l'humidité. La longévité du produit stérile dépend des conditions de stockage et du type d'emballage.

Plus d'informations à l'adresse [med.wh.com/fr\\_france/produits-medical/sterilisation](http://med.wh.com/fr_france/produits-medical/sterilisation)

### Fabricant :

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**  
 Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
 51111 Bürmoos, **Austria**  
 t +43 6274 6236-0  
 f +43 6274 6236-55  
 office@wh.com  
 med.wh.com

### Distribution :

**W&H France**  
 4 rue Ettore Bugatti  
 67201 Eckbolsheim, **France**  
 t. +33 388 773600  
 commercial.fr@wh.com  
 med.wh.com

### W&H CH-AG

Industriepark 9  
 8610 Uster, **Schweiz**  
 t +41 43 4978484  
 f +41 43 4978488  
 info.ch@wh.com  
 med.wh.com